

Notes de version de KeySoft – Mise à jour de avril 2022

KeyWord V13.0

- Ouvrez et enregistrez des documents sur Google Drive et d'autres systèmes de stockage en nuage.
- Naviguez à l'aide d'éléments de visualisation Web lors de la prévisualisation d'un document
 - o Appuyez sur **Entrée + V** pour afficher l'aperçu.
- Correction du problème où le texte arabe n'était pas affiché visuellement dans l'aperçu.
- La procédure d'impression a été simplifiée.
 - o Un bouton d'impression est disponible dans le mode de prévisualisation.
- Sauter à la boîte d'édition d'enregistrement lors de la navigation dans les KeyFiles (**Espace + S**).

KeyBRF V11.0

Mise à jour pour permettre l'accès au stockage en nuage Google Drive.

KeyCalc V11.0

- Mise à jour de la bibliothèque braille Duxbury
- Correction d'un plantage dans KeyCalc

KeyFiles V11.0

- KeyFiles modernisé pour permettre l'accès à Google Drive et d'autres stockage en nuage.
- Limitation de la copie vers OneDrive
 - o OneDrive ne sera pas visible lorsque la copie est évoquée.
- Limitation de l'ouverture et de l'enregistrement des fichiers dans Dropbox
 - o Lors de l'enregistrement d'un fichier existant, Dropbox créera une nouvelle copie.
- Remplacement du raccourci Coller par un raccourci d'action (**Retour arrière + A**)
- Fonction Où suis-je (**Espace + points 1-5-6**) vous donne l'emplacement actuel dans une liste.
- Documents et dossier de téléchargement épinglés à la sélection de stockage

KeyMath V10.0

- Nouvelle bibliothèque braille Duxbury
- Correction des symboles mathématiques non représentés correctement.
- Correction de certaines expressions pour accepter une plus grande variété de paramètres.

KeyMail V13.0

- Correction du problème pour lequel une page d'erreur s'affiche lorsque vous essayez de configurer un compte à l'aide de votre identifiant Google.
- Mise à jour pour permettre l'accès au stockage en nuage Google Drive.

KeySlides V1.0

- Une nouvelle application KeySoft de lecture de fichiers PowerPoint
 - o Diapositive suivante = **Entrée + O**
 - o Diapositive précédente = **Entrée + points 2-4-6**
 - o Index = **Entrée + I**
 - o Basculer entre les notes et la diapositive = **Espace + N**
 - o Aller à la diapositive à partir de la vue de l'index = **Entrée + G**

Tableaux braille de nouvelles langues

- Ajout de tables braille en espagnol, français et allemand pour suivre la Méthode 2 (UKAAF) et la Méthode 3 (BANA)

Notes de version de KeySoft – Mise à jour de avril 2022

- UEB requis pour les ponctuations. Lettres de grade 1.
- Accents natifs requis. (Pas UEB)

KeySoft & Braille Manager :

- Mise à jour de la bibliothèque braille Duxbury
- Amélioration de l'accessibilité à Google Docs et Kindle.
 - Introduction de raccourcis en braille dans Google Docs, sous réserve de rupture lors de la mise à jour de Google. La liste des raccourcis est disponible sur la page d'assistance de HumanWare.
 - Passer à la page suivante dans Kindle en appuyant sur **Entrée + O** ou à la page précédente en appuyant sur **Entrée + points 2-4-6**. Vous pouvez également utiliser les touches de façade Gauche et Précédent ou Droite et Suivant.

KeyUpdater V10 :

- Une mise à jour en deux temps est nécessaire pour installer cette version.
 - La première mise à jour mettra à jour KeyUpdater seulement
 - Une deuxième mise à jour est nécessaire pour installer cette version.

Easy Reader :

- Nouvelle bibliothèque ajoutée : Calibre Audio (UK)
- Bibliothèque mise à jour : Blind Low Vision (NZ); Ajout de deux nouvelles catégories : « Livres » et « Magazines ».
- Diverses corrections, notamment lorsque la vitesse audio ne fonctionnait pas dans certains livres.