

Juin 2020, notes de version pour la mise à jour logiciel du BrailleNote Touch Plus

Mode unimanuel

- BrailleNote Touch Plus propose désormais un mode unimanuel pour la saisie en braille, utile pour les utilisateurs limités à l'utilisation d'une seule main. Le mode unimanuel ne fonctionne qu'avec le clavier braille HumanWare; le mode à deux mains bimanuel par défaut sera actif lors de l'utilisation de TouchBraille ou d'un clavier standard.
- Pour activer le mode unimanuel, maintenez enfoncée la touche **ENTRÉE**, et le **bouton Action** (le bouton à côté de la prise de casque d'écoute sur le bord droit de votre appareil) pendant 5 secondes jusqu'à ce que vous entendiez "Mode unimanuel activé". Notez que vous DEVEZ maintenir la touche **ENTRÉE** avant le bouton Action pour activer le mode unimanuel. Ce mode reste en vigueur jusqu'à ce qu'il soit délibérément désactivé.
- Pour revenir au mode à deux mains bimanuel, maintenez enfoncée la touche **ENTRÉE** puis le bouton d'action jusqu'à ce que KeySoft annonce «Mode unimanuel désactivé».

Calculatrice Scientifique dans KeyCalc

- KeyCalc comprend désormais des fonctions scientifiques complètes
- Supporte l'entrée braille informatique, UEB, Nemeth, LaTeX et des mathématiques françaises
- Basculez entre les résultats décimaux et fractionnaires en appuyant sur la touche **Entrée** avec la **lettre G**
- Comprend l'UEB et le sélecteur de symboles Nemeth
- Comprend le sélecteur de symboles mathématiques
- Accédez à l'historique des calculs et des résultats en appuyant sur la **touche de façade gauche précédent**

Nouvelles tables d'apprentissage du braille anglais :

Apprenez le braille anglais par étapes à partir de 8 cours au choix.

o Les tables d'apprentissage de l'anglais suivantes sont incluses:

- **Apprenez le braille anglais par étapes à partir de 8 cours au choix.**
 - o Les tables d'apprentissage d'anglais suivantes sont incluses:
 - NLS I.M.B.T (UEB 2015)
 - TSBVI Clusters
 - Braille in Easy Steps
 - Fingerprint (UEB)
 - Take Off Series
 - RNZFB STAR
 - S.A Syllabus Level
 - Mangold Method
 - o Le braille que vous lisez est en adapté à votre niveau de braille actuel.
- **Accès GRATUIT au programme complet de la série « UEB Take-Off » en collaboration avec RNIB**

- Les documents pour les enseignants et les étudiants sont disponibles sur la page de support de HumanWare

EasyReader +

- **NOUVEAU : Ajout de la bibliothèque de journaux RNIB Reading Services, Royaume-Uni**
- **NOUVEAU : Blind Low Vision, NZ**
Une nouvelle bibliothèque a été ajoutée appelée «*Blind Low Vision*» de Nouvelle-Zélande.

Correctifs et améliorations :

- L'ouverture des fichiers TXT dans KeyWord est plus rapide.
- Augmentation de la limite d'avertissement TXT de 300 Ko à 10 Mo.
- Lorsque vous travaillez avec plusieurs documents, KeyWord arrêtais – Corrigé.
- Correction du changement rapide d'application qui revenait au menu principal.
- Mappé Assigner le bouton d'action pour enregistrer un message audio lors de l'utilisation de l'application « What's app ».
- KeyWord arrêtais lorsque des documents arabes incluaient des Tashkeels – Corrigé.
- Autres corrections de bugs.