

Connect 12




Guía Rápida de Inicio




GUÍA RÁPIDA DE INICIO

1. Sobre una superficie plana y estable, sujete el soporte en sentido vertical, asegurándose de que el panel con la palabra "Connect" esté orientado hacia la parte posterior. Sostenga el asa con una mano y despliegue el panel inferior con la otra hasta que quede abierto sobre la mesa.

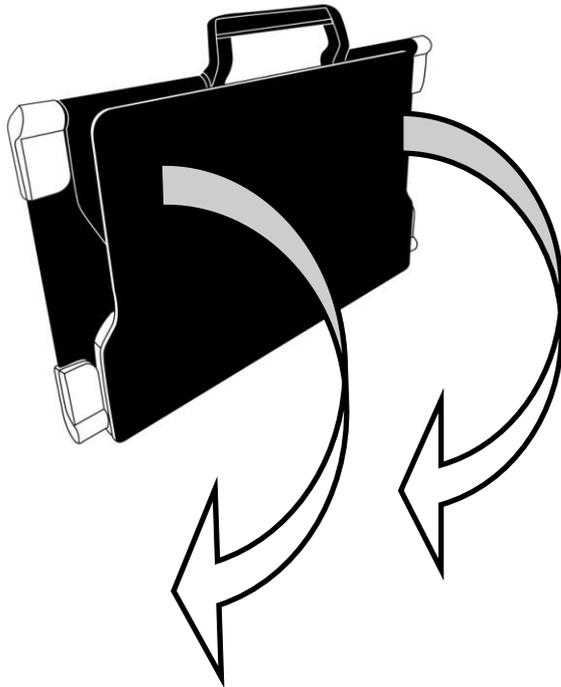


2. Despliegue el panel superior hasta que quede paralelo al panel inferior.

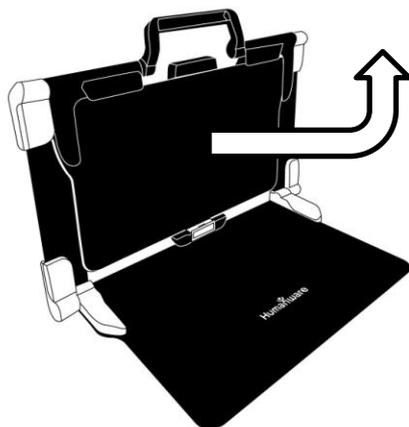

3. Sujete la tableta con el lado de la pantalla hacia usted, asegurándose de que el logotipo de HumanWare esté en la parte superior. Inserte con cuidado la parte superior de su tableta en la ranura y deslícela hacia adelante hasta que se introduzca totalmente. Presione hacia abajo la parte inferior de la tableta; escuchará un clic que indica que su tableta está montada correctamente.



4. Conecte el cable de la fuente de alimentación al puerto de carga, que se encuentra en el lado derecho de la tableta, y enchúfelo a una toma de corriente. Deje que la tableta se cargue hasta que la batería esté llena.

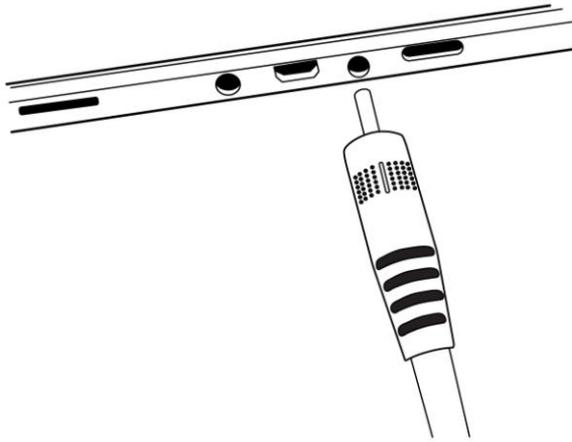

IMPORTANTE: Tenga cuidado al insertar el cable en el puerto de carga.

5. Mantenga presionado el botón de encendido -ubicado en el borde inferior de la tableta- unos instantes para encender su tableta. Los logotipos de HumanWare y Android aparecerán en la pantalla. Su tableta tardará unos 30 segundos en inicializarse.

6. Toque los botones Acercar / Alejar para ajustar el nivel de zoom. Para aumentar el tamaño del carácter, toque el botón Acercar (el derecho). Para disminuir el tamaño del carácter, toque el botón Alejar (el izquierdo). También puede mantener pulsados los botones Acercar / Alejar para ajustar progresivamente el nivel de zoom y soltar una vez que haya alcanzado el nivel de zoom deseado.



Para obtener más información sobre el funcionamiento de su dispositivo, consulte la guía de usuario.

Atención al cliente

Para ayuda al cliente, por favor póngase en contacto con la oficina HumanWare más próxima o visite nuestro sitio web en www.humanware.com

North America: 1 (800) 722-3393
support@humanware.com

Europe: (0044) 1933 415800
eu.support@humanware.com

Australia / Asia: (02) 9686 2600
au.sales@humanware.com