

Procedimiento par instalar la cámara de distancia KODAK SL10 o SL25 en Prodigi Connect 12

Tenga en cuenta que para la instalación de la cámara Kodak, no se requiere usar ninguna aplicación dentro del software Prodigi. Prodigi será compatible con ambos modelos de cámaras, pero solo permite el emparejamiento de uno en uno. La versión 1.5.1. de Prodigi Connect 12 solo es compatible con cámaras Kodak.

Emparejamiento inalámbrico entre la cámara y la tableta

1. Realice la recarga inicial de la cámara.
2. Encienda la cámara Kodak (presione el botón de encendido y la lente se desplegará).
3. Tableta: En el escritorio Android, abra Configuración.
4. Seleccione la pestaña “Conexiones”.
5. Toque Wi-Fi.
6. Toque en la “red” Kodak PIXPRO-SL10_XXXX (no requiere Internet).
 - a. Si es el modelo SL25, elija PIXPRO-SL25_XXXX.
 - b. XXXX son 4 caracteres únicos que distinguen entre cámaras de la misma marca, pero utilizan un único canal para emparejar o usar.
7. Introduzca el código de emparejamiento: 12345678 y pulse el botón Conectar para emparejar.

Se recomienda reiniciar la tableta. Para ello, pulse y mantenga pulsado el botón de encendido de la tableta; seleccione “Reiniciar”. Siga las instrucciones.

Aviso 1: Si se instaló una cámara Sony QUX en la tableta, la aplicación PlayMemories Mobile debe desinstalarse antes de vincular la cámara Kodak SL.

Aviso 2: Solo se puede utilizar una cámara a la vez, si bien pueden estar varias emparejadas. La cámara a utilizar debe estar encendida y las restantes apagadas.

Notice 3: HumanWare dispone de un software especial para las cámaras Kodak. Las cámaras listas para usar no funcionarán con Prodigi.

Notice 4: Si necesita funcionalidad de vídeo, debe instalar la aplicación Kodak PixPro e insertar una tarjeta uSD para guardar los archivos. Prodigi no está preparado para trabajar con vídeos.