

## Nouvelles fonctionnalités ajoutées à Prodigy™

Nous sommes heureux d'annoncer de multiples nouvelles fonctionnalités qui ont été ajoutées au logiciel Prodigy (version 4.5), pris en charge par le Prodigy Connect 12 et le Reveal 16i.

### Sélection de la langue de la fonctionnalité ROC (Reconnaissance optique de caractères) :

Vous pouvez maintenant choisir dans quelle langue utiliser la ROC pour de meilleurs résultats. Comment modifier la langue OCR par défaut?

- Accédez à l'application Loupe.
- Appuyez sur l'icône des Réglages dans la bannière de boutons.
- Faites défiler et appuyez sur l'item Langues OCR.
- Faites défiler et appuyez sur l'item Choisissez langue OCR.
- Sélectionnez une langue parmi la liste.

### Sélectionnez jusqu'à 4 voix système :

Le nombre de voix que vous pouvez utiliser dans Prodigy est passé de 2 à 4. Comment télécharger et installer des voix?

- Accédez à l'application Réglages de Prodigy.
- Appuyez sur l'item Interface utilisateur.
- Faites défiler et appuyez sur l'item Langue du système.
- Appuyez sur Configuration.
- Sélectionnez jusqu'à 4 voix parmi la liste.

### Nouvelle calculatrice graphique avec capture de graphiques :

La représentation graphique des fonctions mathématiques est maintenant possible en utilisant la calculatrice de Prodigy. Les graphiques peuvent être capturés et enregistrés en tant que documents dans la Galerie en suivant les étapes suivantes :

- Accédez à l'application Calculatrice.
- Appuyez sur l'icône des Réglages dans le coin supérieur gauche de l'écran.
- Appuyez sur Mode.
- Sélectionnez Graphique.
- Retournez à la calculatrice.
- Créez un graphique avec la calculatrice.
- Appuyez sur le bouton Capture dans la bannière de boutons. La capture d'écran sera sauvegardée automatiquement dans le dossier Captures d'écran de l'application Galerie.

Regardez notre nouveau [vidéo sur la Calculatrice graphique](#).

### Ajouter un graphique de fonction à un document :

Les graphiques créés avec la Calculatrice peuvent également être ajoutés à la fin de documents existants. Comment ajouter des graphiques à la fin de documents?

- Accédez à l'application Galerie de Prodigy.
- Créez ou ouvrez un document.
- Appuyez sur l'item Réglages dans le coin supérieur droit de l'écran.
- Appuyez sur l'item Ajouter.
- Appuyez sur Nouveau graphique.
- Créez le graphique et appuyez sur l'icône Sauvegarder dans la bannière de boutons. Cela placera le graphique à la fin du document.

Regardez cette [vidéo expliquant comment ajouter des graphiques](#) à la fin de documents.

### **Sauvegarder des captures d'écran dans la Galerie :**

Les captures d'écran peuvent maintenant être effectuées sur la Connect 12 ou la Reveal 16i en utilisant ces méthodes : le raccourci des boutons (volume bas + bouton d'alimentation) ou le bouton virtuel dans la bannière d'Android. La capture d'écran sera automatiquement sauvegardée dans le dossier Captures d'écran de la Galerie.

Regardez notre [vidéo sur les captures d'écran](#).

### **Nouveau filtre de lumière bleue**

Il y a maintenant 4 niveaux de filtre de lumière bleue dans Prodigy. Lorsqu'il est activé, le filtre est disponible dans les interfaces Prodigy et Android pour limiter la fatigue oculaire.

Pour utiliser le nouveau filtre :

- Accédez à l'application Réglages de Prodigy.
- Appuyez sur l'item Interface utilisateur.
- Faites défiler et appuyez sur l'item Filtre de lumière bleue.
- Choisissez parmi les niveaux Faible, Moyen, Élevé et Maximum.

### **Nouveau mode examen**

Votre appareil peut maintenant être verrouillé pour une durée prédéterminée durant une section d'examen avec une protection par NIP. Pour utiliser le Mode examen :

- Accédez à l'application Réglages de Prodigy.
- Faites défiler et appuyez sur l'item Mode examen.
- Appuyez de nouveau sur Mode examen pour l'activer.
- Sélectionnez l'heure de début, la durée et les fonctionnalités que vous souhaitez verrouiller.
- Appuyez sur le bouton Retour.
- Créez un NIP pour déverrouiller le Mode examen.

Regardez un [vidéo sur l'utilisation du Mode examen](#).

### **Profils utilisateurs**

La création de profils pour vos élèves ou utilisateurs facilite le partage des appareils lorsque cela est nécessaire. Il n'est désormais plus nécessaire de réinitialiser l'appareil en usine. Voici comment créer des profils d'utilisateur :

- Accédez aux Paramètres d'Android.
- Faites défiler et appuyez sur l'item *Users*.

- Appuyez sur *Add user or Profile*.
- Appuyez sur *User* dans la fenêtre qui apparaîtra.
- Suivez les instructions à l'écran.

### **Prise en charge de Code Jumper**

Les utilisateurs peuvent désormais connecter les dispositifs du Code Jumper avec l'interface Prodigy. Pour effectuer la connexion :

- Activez le Code Jumper.
- Dans Prodigy, accédez à l'application Réglages.
- Faites défiler et sélectionnez l'item Système.
- Faites défiler et sélectionnez l'item Configuration Bluetooth.
- Activez le signal Bluetooth, s'il n'est pas déjà activé.
- Faites défiler et sélectionnez l'item Appareils.
- Sélectionnez votre appareil Code Jumper dans la liste.
- Appuyez sur Connecter.
- Votre Code Jumper est maintenant jumelé à votre appareil et prêt pour utilisation.

Si vous avez des questions ou des commentaires, n'hésitez pas à contacter le service technique de HumanWare.