


Installation d'une mise à jour sur votre appareil explorē 12

1. Téléchargez les fichiers de mise à jour du logiciel explorē 12.
2. À l'aide du câble USB fourni avec votre explore 12, connectez l'appareil à l'ordinateur où sont téléchargés les fichiers de mise à jour du logiciel.
3. Copiez le fichier BRN téléchargé dans le répertoire racine de l'appareil.

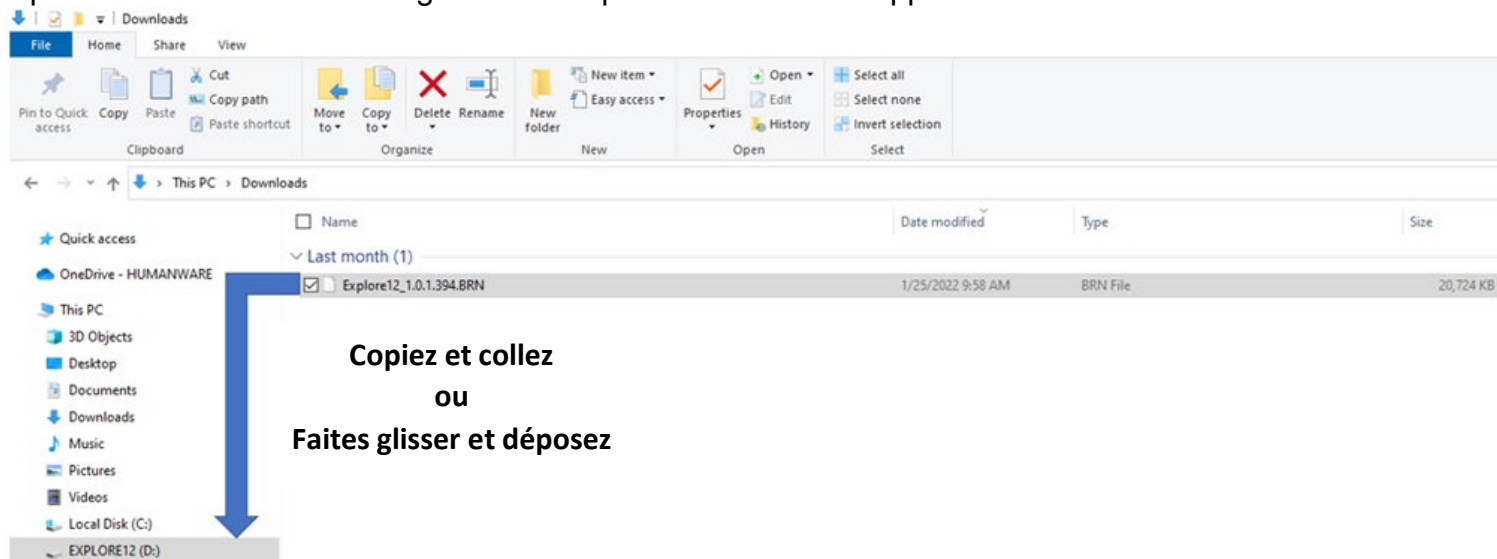

4. Déconnectez l'explorē 12 de l'ordinateur.
5. Redémarrez l'appareil en appuyant sur le bouton d'alimentation.
6. « Mise à jour logicielle » s'affiche sur l'écran de l'appareil et la mise à jour est terminée.
7. Vérifiez que la version de logiciel correspond au numéro de version du fichier BRN dans Paramètres -> À propos.