

Sauvegarder vos fichiers sur le BrailleNote Touch et restaurer vos fichiers et applications sur le BrailleNote Touch Plus

Sauvegarder vos fichiers sur le BrailleNote Touch :

Pour faire la sauvegarde de vos fichiers personnels créés sur le BrailleNote Touch, vous aurez besoin d'une **carte SD** ou d'une **clé USB**. Insérez la carte SD ou la clé USB dans votre BrailleNote Touch et suivez les étapes ci-dessous.

Note : Copiez seulement les fichiers et dossiers personnels que vous avez créés avec votre BrailleNote Touch. Ne copiez pas les dossiers du système d'exploitation de votre appareil. Seuls les fichiers contenant de l'information personnelle peuvent être copiés sécuritairement, comme le dossier Document, le dossier DCIM ou des dossiers que vous avez créés vous-même. **N'ESSAYEZ PAS** de copier des fichiers avec du contenu spécifique à des applications, comme des livres associés à certaines applications, puisqu'ils risquent de ne pas se restaurer correctement sur le BrailleNote Touch Plus. Vous devrez télécharger le contenu de nouveau via l'application lorsque cette dernière sera installée sur votre BrailleNote Touch Plus. Vos applications, vos contacts, votre calendrier et vos courriels sont tous liés à votre compte Google et se synchroniseront automatiquement lorsque vous ajoutez votre compte Google à votre BrailleNote Touch Plus.

1. À partir du menu principal, rendez-vous à KeyFiles en **appuyant sur G**.
2. Appuyez sur **Espace avec D** pour accéder à la liste de vos lecteurs, puis rendez-vous à « Stockage » en utilisant la **touche de façade Suivant**.
3. Si vous voulez copier des dossiers complets, incluant les sous-dossiers, rendez-vous au nom du premier dossier à copier soit en inscrivant la première lettre du nom du dossier jusqu'à ce que vous l'atteigniez, ou en utilisant les touches de façade **PRÉCÉDENT** et **SUIVANT** pour parcourir la liste. Lorsque vous atteignez le premier dossier à copier, appuyez sur **Retour arrière avec L** pour le sélectionner, puis faites de même pour chaque dossier que vous voulez copier en appuyant sur **Retour arrière avec L** sur chacun d'entre eux.

Note : Si vous voulez copier des fichiers d'un dossier en particulier sans copier le dossier au compte, ouvrez le dossier en appuyant sur **Entrée** sur le nom de dossier, puis rendez-vous à chacun des fichiers à sélectionner et appuyez sur **Retour arrière avec L** pour les sélectionner.

Note : Si vous ne voulez pas copier un dossier, mais que vous souhaitez seulement sélectionner tout son contenu, ouvrez le dossier et appuyez sur **Entrée avec les points 1 2 3 4 5 6** pour sélectionner tous les fichiers et sous-dossiers qu'il contient.

4. Lorsque vous avez sélectionné les fichiers ou dossiers que vous souhaitez copier, appuyez sur **Retour arrière avec Y** et vous devriez recevoir le message « copié ».
5. Appuyez sur **Espace avec D** pour revenir à votre liste de lecteurs, puis naviguez à votre Carte SD ou USB en utilisant la **touche de façade Suivant**, selon ce que vous avez choisi pour faire votre sauvegarde, et **appuyez sur Entrée**.

6. Si vous voulez simplement coller tous les fichiers ou dossiers sélectionnés à la racine de la carte SD ou de la clé USB, appuyez sur **Retour arrière avec V**, et les fichiers et dossiers seront sauvegardés sur votre carte SD ou clé USB. Si vous voulez coller les fichiers sélectionnés dans un dossier en particulier sur la carte SD ou la clé USB, rendez-vous au dossier où vous voulez sauvegarder les fichiers et appuyez sur **Entrée** pour ouvrir le dossier, puis sur **Retour arrière avec V** pour y coller les fichiers.
7. Confirmez que tous les fichiers ou dossiers qui devaient être copiés sont maintenant sur votre carte SD ou clé USB.
8. Éjectez votre carte SD ou votre clé USB en appuyant sur **Entrée avec E**. Rendez-vous ensuite à Éjecter carte SD Externe s'il s'agit d'une carte SD ou Éjecter stockage USB s'il s'agit d'une clé USB, puis appuyez sur **Entrée**. Attendez le message vous indiquant que vous pouvez maintenant retirer la carte SD ou clé USB avant de la retirer de votre BrailleNote Touch.

Note : Il est également possible d'accéder à toutes les fonctionnalités comme sélectionner, copier et coller à partir du **menu contextuel** en appuyant sur le bouton Menu contextuel, c'est-à-dire le bouton carré situé devant votre BrailleNote Touch, à droite du bouton Accueil, ou en appuyant sur **Espace avec M**.

Restaurer les fichiers sur votre BrailleNote Touch Plus

Pour restaurer sur le BrailleNote Touch Plus les fichiers et dossiers provenant de la sauvegarde de votre BrailleNote Touch, insérez la carte SD ou la clé USB contenant votre sauvegarde et suivez les étapes ci-dessous.

1. À partir du menu principal, rendez-vous à KeyFiles en **appuyant sur G**.
2. Appuyez sur **Espace avec D** pour accéder à la liste de lecteurs, puis rendez-vous à carte SD ou clé USB en utilisant la **touche de façade Suivant**, dépendamment de ce que vous avez choisi pour faire votre sauvegarde, puis **appuyez sur Entrée**.
3. Si vous voulez copier des dossiers complets, incluant les sous-dossiers, rendez-vous au nom du premier dossier à copier soit en inscrivant la première lettre du nom du dossier jusqu'à ce que vous l'atteigniez, ou en utilisant les touches de façade **PRÉCÉDENT** et **SUIVANT** pour parcourir la liste. Lorsque vous atteignez le premier dossier à copier, appuyez sur **Retour arrière avec L** pour le sélectionner, puis faites de même pour chaque dossier que vous voulez copier en appuyant sur **Retour arrière avec L** sur chacun d'entre eux.

Si vous voulez copier des fichiers d'un dossier en particulier sans copier le dossier au compte, ouvrez le dossier en appuyant sur **Entrée** sur le nom de dossier, puis rendez-vous à chacun des fichiers à sélectionner et appuyez sur **Retour arrière avec L** pour les sélectionner.

Prenez note que si vous ne voulez pas copier un dossier, mais que vous voulez simplement sélectionner tout son contenu, ouvrez ce dossier et appuyez sur Entrée avec les points 1 2 3 4 5 6 pour sélectionner tous les fichiers et sous-dossiers qu'il contient.

4. Lorsque vous avez sélectionné les fichiers ou dossiers que vous souhaitez copier, appuyez sur **Retour arrière avec Y** et vous devriez recevoir le message « copié ».
5. Appuyez sur **Espace avec D** pour revenir à votre liste de lecteurs, puis rendez-vous à Stockage en utilisant la **touche de façade Suivant**.
6. Si vous collez des dossiers qui se trouvaient à la racine du lecteur Stockage de votre ancien BrailleNote Touch, appuyez sur **Retour arrière avec V** pour coller les dossiers. Si vous voulez coller les fichiers sélectionnés dans un dossier en particulier, comme le dossier Documents, rendez-vous au dossier où vous voulez coller les fichiers et appuyez sur **Entrée** pour ouvrir le dossier, puis sur **Retour arrière avec V** pour y coller les fichiers.
7. Éjectez votre carte SD ou votre clé USB en appuyant sur Entrée avec E. Rendez-vous ensuite à Éjecter carte SD Externe s'il s'agit d'une carte SD ou Éjecter stockage USB s'il s'agit d'une clé USB, puis appuyez sur Entrée. Attendez le message vous indiquant que vous pouvez maintenant retirer la carte SD ou clé USB avant de le ou la retirer de votre BrailleNote Touch.

Note : Il est également possible d'accéder à toutes les fonctionnalités comme sélectionner, copier et coller à partir du **menu contextuel** en maintenant enfoncé le bouton Applications récentes, c'est-à-dire le bouton carré situé devant votre BrailleNote Touch, à droite du bouton Accueil, ou en appuyant sur **Espace avec M**.

Restaurer les applications sur votre BrailleNote Touch Plus :

Vous pouvez restaurer les applications que vous avez téléchargées avec votre compte Google sur votre ancien BrailleNote Touch, ce qui signifie que vous n'avez pas besoin de racheter des applications que vous avez déjà achetées par le passé. Important : Vous devez vous connecter au même Compte Google que vous utilisiez avec votre ancien BrailleNote Touch pour avoir accès aux applications que vous avez téléchargées dans le Play Store. Pour installer les applications après vous être connecté à votre compte Google, suivez les étapes ci-dessous.

1. À partir du menu principal, appuyez sur P jusqu'à ce que vous atteigniez Play Store, puis appuyez sur Entrée.
2. Rendez-vous au bouton Afficher le panneau de navigation en utilisant la **touche de façade Précédent** et appuyez sur **Entrée**.
3. Rendez-vous à Mes applications et mes jeux en appuyant sur la **touche de façade Suivant** et appuyez sur **Entrée**.
4. Rendez-vous à Bibliothèque en utilisant la **touche de façade Suivant** et appuyez sur **Entrée**.
5. Déplacez-vous en utilisant la touche de façade Suivant et vous recevrez le message « Pas sur cet appareil ». Continuez à vous déplacer de cette façon, et vous défilerez à travers une liste d'applications qui ont déjà été téléchargées sur votre compte Google. Tandis que vous naviguez sur chacune des applications, il y aura un champ indiquant que l'application n'est pas installée, suivi d'un bouton Installer. Appuyez sur Entrée sur le bouton « Installer » et l'application s'installera. Notez que vous devrez

installer chaque application individuellement en appuyant sur **Entrée** lorsque vous vous trouvez sur le bouton Installer pour chaque application que vous souhaitez installer sur votre BrailleNote Touch Plus.