

explorē 12 : Installation de la mise à jour v1.1.5

Important : la mise à jour v1.1.5 peut supprimer toutes les images existantes dans votre appareil. Il est toujours préférable de sauvegarder vos fichiers d'image avant toute mise à jour. Les instructions de la procédure de sauvegarde des fichiers pour l'appareil explorē se trouvent à l'adresse suivante:

<https://www.humanware.com/support/explore-12-portable-video-magnifier/>.

Introduction : La mise à jour du logiciel v1.1.5 pour la loupe explorē 12 résout les problèmes de batterie et de charge rencontrés avec certains appareils.

Dans certains cas, la mise à jour vers le logiciel v1.1.5 se fera en deux étapes : d'abord vers 1.0.1.371, puis vers *v1.1.5.445.

Veuillez suivre attentivement les instructions ci-dessous. Si vous ne le faites pas, vous risquez de devoir renvoyer votre appareil pour une réinstallation du logiciel à vos frais.

Une démonstration vidéo générale de ce processus est disponible sur la page support d'explorē à l'adresse suivante : <https://www.humanware.com/support/explore-12-portable-video-magnifier/>.

Instructions de mise à jour :


1. Vérifiez et notez la version actuelle du logiciel de votre explorē 12.
 - a. Mettez l'appareil sous tension.
 - b. Appuyez sur le bouton orange de contraste et maintenez-le enfoncé pour accéder au menu.
 - c. Trouver et sélectionner l'option À propos dans le menu.
 - d. Notez la version de votre logiciel : _____

Si votre numéro de version est inférieur à v1.0.1.371, suivez toutes les étapes ci-dessous.

Si votre numéro de version est v1.0.1.371 ou plus haut, suivez les étapes 2 à 4, puis passez à l'étape 11.

2. Téléchargez le fichier Explore12_Update_1.1.5.ZIP à partir de <https://www.humanware.com/support/explore-12-portable-video-magnifier/>.


- Localisez le fichier ZIP téléchargé sur votre ordinateur, puis cliquez sur « Extraire tout » dans la barre d'outils ou cliquez avec le bouton droit de la souris sur le fichier et sélectionnez « Extraire tout ». Souvenez-vous de l'endroit où vous avez extrait ces fichiers.

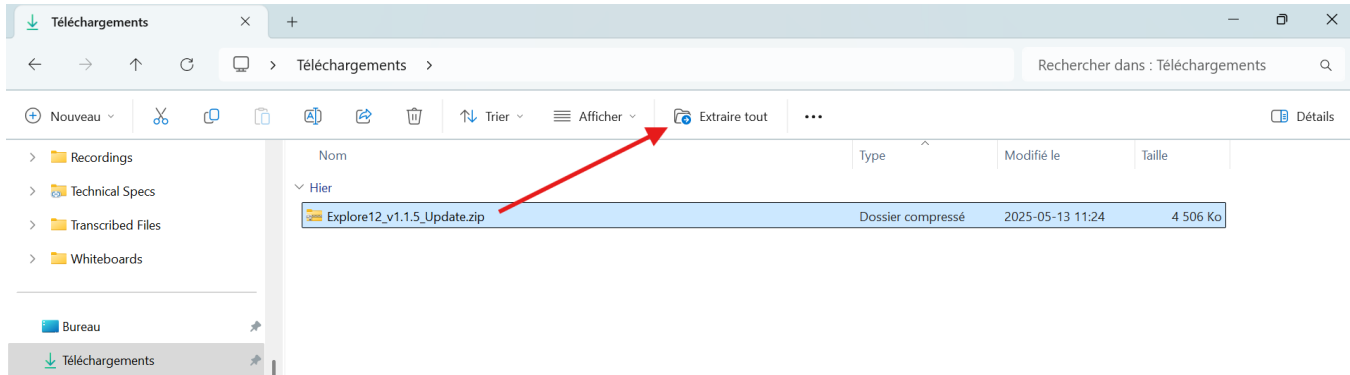

- Connectez l'appareil exploré 12 à l'ordinateur où les fichiers de mise à jour ont été téléchargés à l'aide du câble USB fourni.
- Allez dans les fichiers extraits à l'étape 3 sur votre ordinateur.

Localisez ce fichier : Explore12_v1.0.1.371.BRN.

Copiez-collez ou glissez-déposez le fichier à la racine de l'appareil exploré 12.

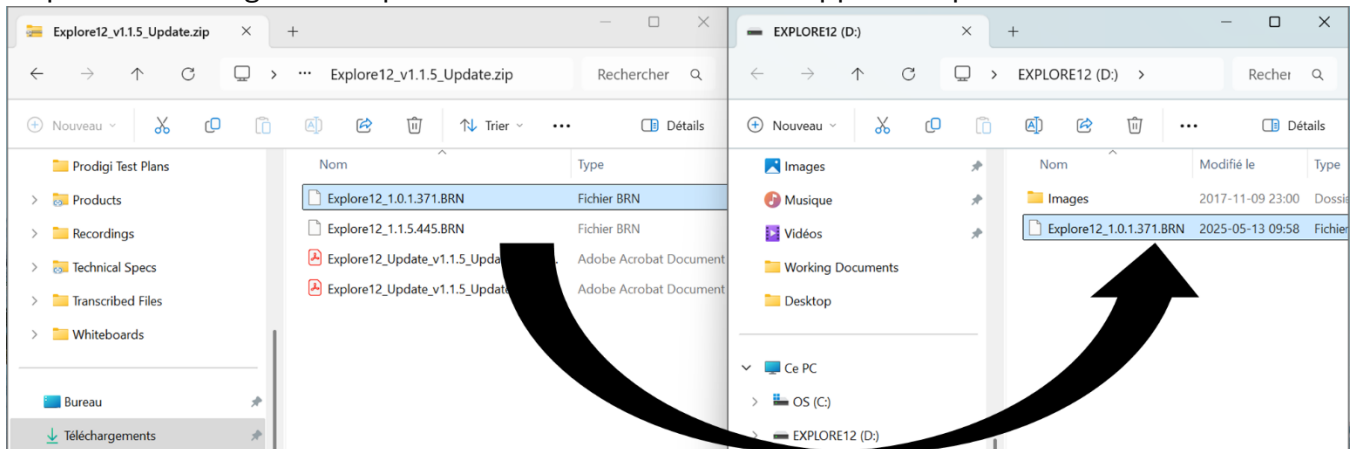


- Déconnectez l'appareil de l'ordinateur.
- Redémarrer l'appareil en appuyant sur le bouton d'alimentation.
- Le message « Mise à jour du logiciel » s'affichera sur l'écran de l'appareil.

9. Allumez l'exploré 12 et vérifiez la version du logiciel (voir l'étape 1 pour les instructions). La version devrait être maintenant 1.0.1.371.
10. Mettez l'appareil hors tension et reconnectez-le à l'ordinateur.
11. Allez dans les fichiers extraits à l'étape 3 sur l'ordinateur.

Trouvez le fichier intitulé "Explore12_1.1.5.445". BRN

Copiez et collez, ou faites glisser et déposez, le fichier Explore12_1.1.5.445.BRN à la racine de l'appareil exploré 12.

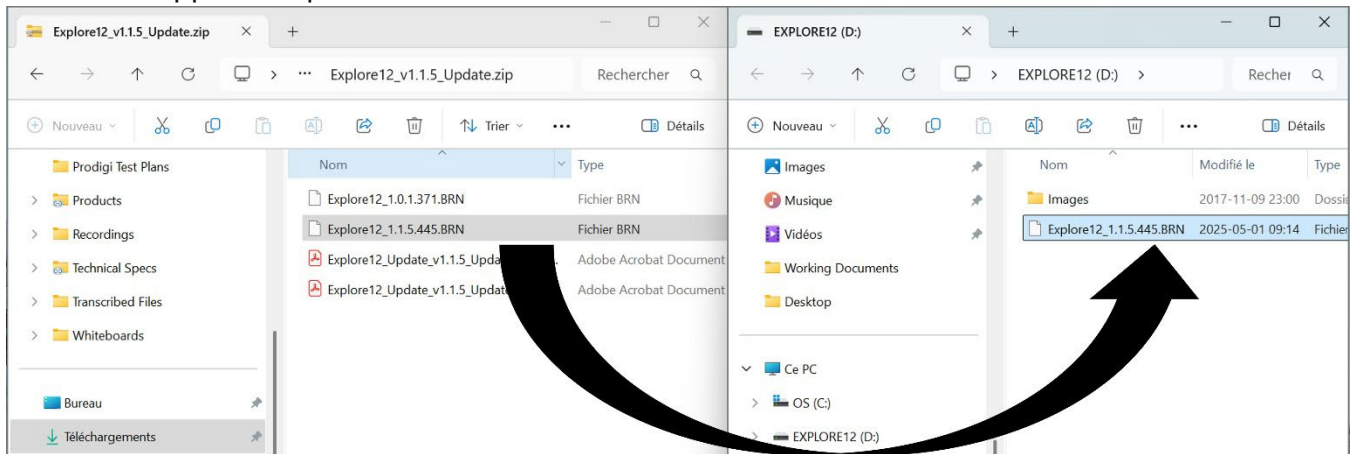

12. Déconnectez l'appareil de l'ordinateur.
13. Redémarrez l'appareil en appuyant sur le bouton d'alimentation.
14. Le message « Mise à jour du logiciel » s'affichera sur l'écran de l'appareil.
15. Allumez l'exploré 12 et vérifiez la version du logiciel (voir l'étape 1 pour les instructions). La version devrait être maintenant 1.1.5.445.

Félicitations ! Votre exploré 12 est maintenant à jour. Assurez-vous de consulter le dernier guide de l'utilisateur et les vidéos, qui démontrent les caractéristiques et les fonctionnalités de votre loupe. Vous pouvez accéder à ces informations à partir de la page de support d'exploré sur notre site Web à l'adresse suivante : <https://www.humanware.com/support/explore-12-portable-video-magnifier/>.

Dites-nous comment nous nous débrouillons.

***Au fil du temps, ce numéro de version peut être supérieur à v1.1.5.445, mais le processus est le même.**