

## explorē 12 : Installation de la mise à jour v1.1.6\*

**Important :** la mise à jour v1.1.6 peut supprimer toutes les images existantes dans votre appareil. Il est toujours préférable de sauvegarder vos fichiers d'image avant toute mise à jour. Les instructions de la procédure de sauvegarde des fichiers pour l'appareil explorē se trouvent à l'adresse suivante:

<https://www.humanware.com/support/explore-12-portable-video-magnifier/>.

**Introduction :** Les mises à jour logicielles pour l'explorē12 ajoutent des fonctions, améliorent la stabilité, corrigent des problèmes connus ou apportent de petits affinements. Nous recommandons d'installer chaque mise à jour dès que possible.

Dans certains cas, la mise à jour vers le logiciel v1.1.6 se fera en deux étapes : d'abord vers 1.0.1.371, puis vers v1.1.6.450.

Veuillez suivre attentivement les étapes ci-dessous. Le non-respect de ces étapes peut vous obliger à retourner l'appareil pour une réinstallation logicielle à vos frais.

Une démonstration vidéo générale de ce processus est disponible sur la page support d'explorē à l'adresse suivante : <https://www.humanware.com/support/explore-12-portable-video-magnifier/>.

### Instructions de mise à jour :


1. Vérifiez et notez la version actuelle du logiciel de votre explorē 12.
  - a. Mettez l'appareil sous tension.
  - b. Appuyez sur le bouton orange de contraste et maintenez-le enfoncé pour accéder au menu.
  - c. Trouver et sélectionner l'option À propos dans le menu.
  - d. Notez la version de votre logiciel : \_\_\_\_\_

Si votre numéro de version est inférieur à v1.0.1.371, suivez toutes les étapes ci-dessous.

Si votre numéro de version est v1.0.1.371 ou plus haut, suivez les étapes 2 à 4, puis passez à l'étape 11.


2. Téléchargez la mise à jour « explorē 12 v1.1.6 » depuis :  
<https://www.humanware.com/support/explore-12-portable-video-magnifier/>.

- Repérez le fichier ZIP téléchargé sur votre ordinateur, puis cliquez sur « Extraire tout » dans la barre d'outils ou faites un clic droit sur le fichier et sélectionnez « Extraire tout ». Notez l'emplacement où vous avez extrait ces fichiers.

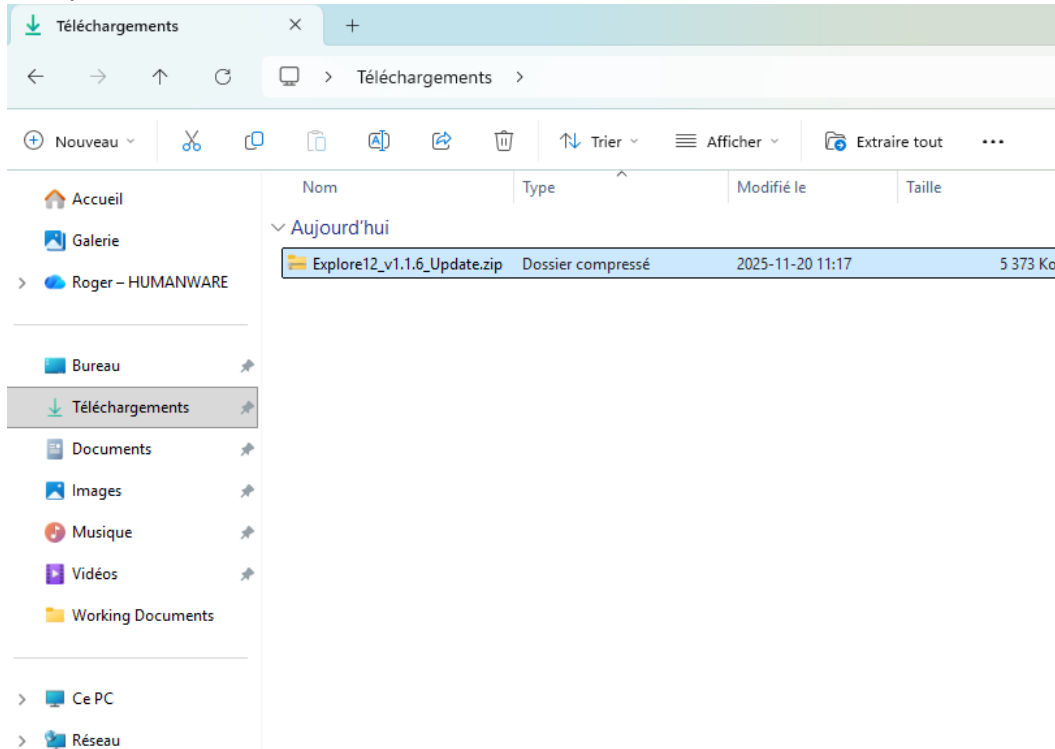


- Branchez l'exploré 12 à l'ordinateur où les fichiers ont été téléchargés à l'aide du câble USB fourni.
- Ouvrez le dossier des fichiers extraits à l'étape 3. Repérer ce fichier : Explore12\_v1.0.1.371.BRN.

Copiez-collez ou glissez-déposez ce fichier à la racine de l'appareil exploré 12.

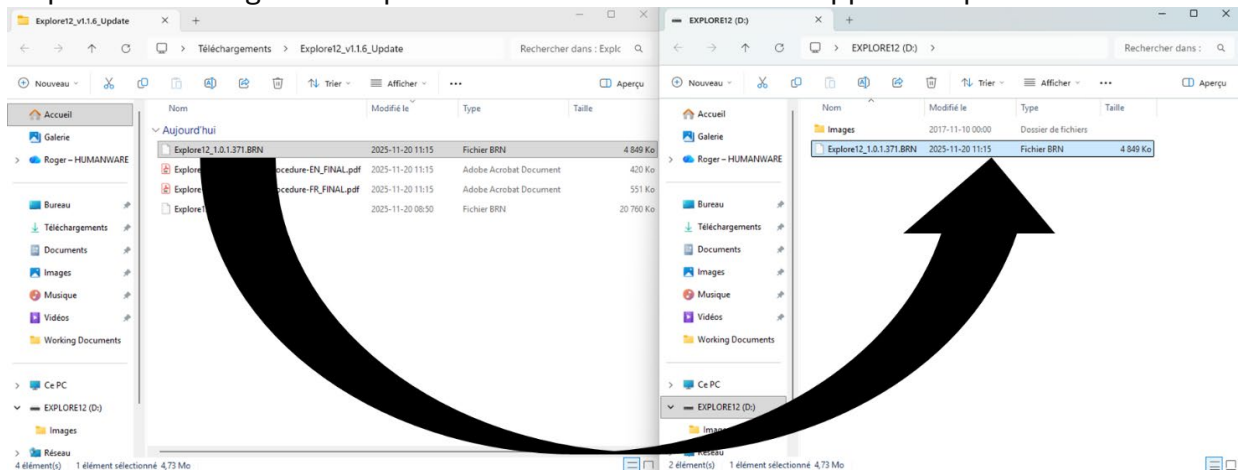

6. Débranchez l'appareil de l'ordinateur.
7. Redémarrer l'appareil en appuyant sur le bouton d'alimentation.
8. L'écran affichera « mise à jour logicielle ».
9. Rallumez l'exploré 12 et vérifiez la version logicielle (voir l'étape 1). La version doit maintenant indiquer 1.0.1.371.
10. Eteignez l'appareil et rebranchez-le à l'ordinateur.
11. Ouvrez le dossier des fichiers extraits à l'étape 3.  
Repérez le fichier : Explore12\_1.1.6.450.BRN.  
Copiez et collez, ou glissez-déposez, le fichier Explore12\_1.1.6.450.BRN à la racine de l'appareil exploré 12.

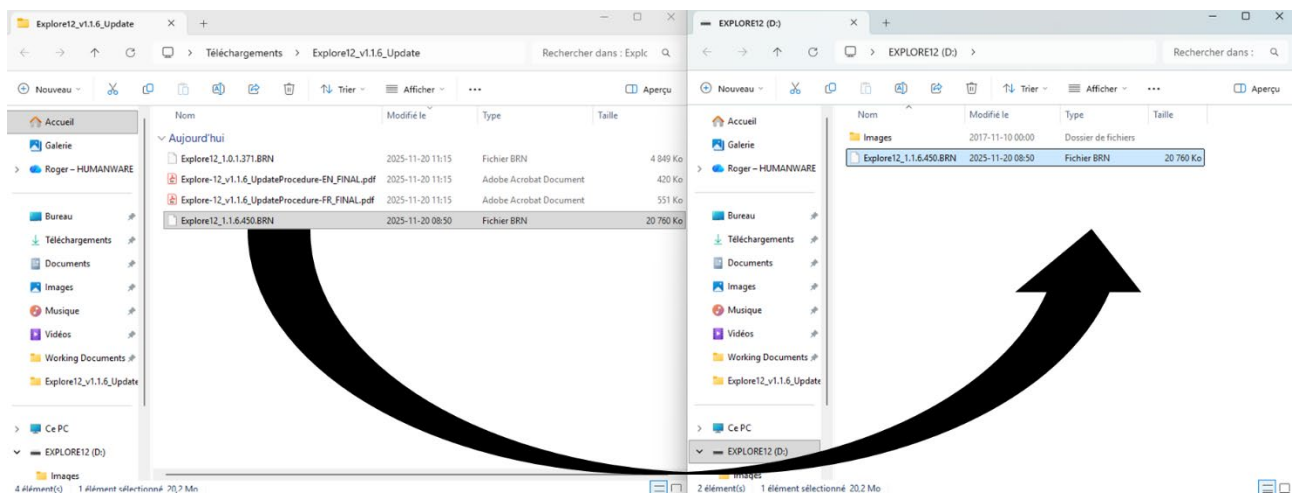

12. Débranchez l'appareil de l'ordinateur.
13. Redémarrez l'appareil en appuyant sur le bouton d'alimentation.
14. L'écran affichera « mise à jour logicielle ».
15. Rallumez l'exploré 12 et vérifiez la version du logiciel (voir l'étape 1 pour les instructions).  
La version doit maintenant indiquer 1.1.6.450.

**Félicitations !** Votre exploré 12 est à jour. Consultez le plus récent Guide de l'utilisateur et les nouvelles vidéos présentant les fonctions ajoutées à votre appareil. Ces ressources sont accessibles sur la page d'assistance exploré : <https://www.humanware.com/support/explore-12-portable-video-magnifier/>.

**Dites-nous comment nous nous débrouillons.**

**\*Avec le temps le numéro de version peut être plus élevé, mais le processus demeure le même.**