

explorē 8 : Installation de la mise à jour v1.3.3

Remarque importante : La mise à jour v1.3.3 peut supprimer toutes les images existantes de votre appareil. Pour éviter toute perte permanente, sauvegardez vos images avant de continuer. Les instructions de sauvegarde se trouvent à l'adresse : <https://www.humanware.com/support/explore-8-handheld-electronic-magnifier/>.

Introduction : Les mises à jour logicielles pour l'explorē 8 ajoutent des fonctions, améliorent la stabilité, corrigent des problèmes connus. Nous recommandons d'installer chaque mise à jour dès que possible.

La mise à jour vers le logiciel v1.3.3 peut se faire en deux étapes : d'abord vers **v1.2.8.655**, puis vers **v1.3.3.690**.*

Veuillez suivre attentivement les étapes ci-dessous. Le non-respect de ces étapes peut vous obliger à retourner l'appareil pour une réinstallation logicielle à vos frais.

REMARQUE : Une vidéo générale de la procédure est disponible sur la page d'assistance explorē : <https://www.humanware.com/support/explore-8-handheld-electronic-magnifier/>.

Instructions de mise à jour :


1. Vérifier et noter la version actuelle du logiciel de votre explorē 8.
 - a. Démarrer l'appareil.
 - b. Appuyer et maintenir le bouton orange de contraste enfoncé pour accéder au menu.
 - c. Descendre jusqu'en bas du menu et sélectionner « À propos ».
 - d. Noter la version de votre logiciel : _____

Si votre version est inférieure à v1.2.8.655, suivez toutes les étapes ci-dessous.

Si votre version est déjà v1.2.8.655 (ou supérieure), suivez les étapes 2 et 3, puis passez directement à l'étape 11.

2. Téléchargez la mise à jour « explorē 8 v1.3.3 » depuis : <https://www.humanware.com/support/explore-8-handheld-electronic-magnifier/>.


3. Repérez le fichier ZIP téléchargé sur votre ordinateur, puis cliquez sur « Extraire tout » dans la barre d'outils ou faites un clic droit sur le fichier et sélectionnez « Extraire tout ». Notez l'emplacement où vous avez extrait ces fichiers.

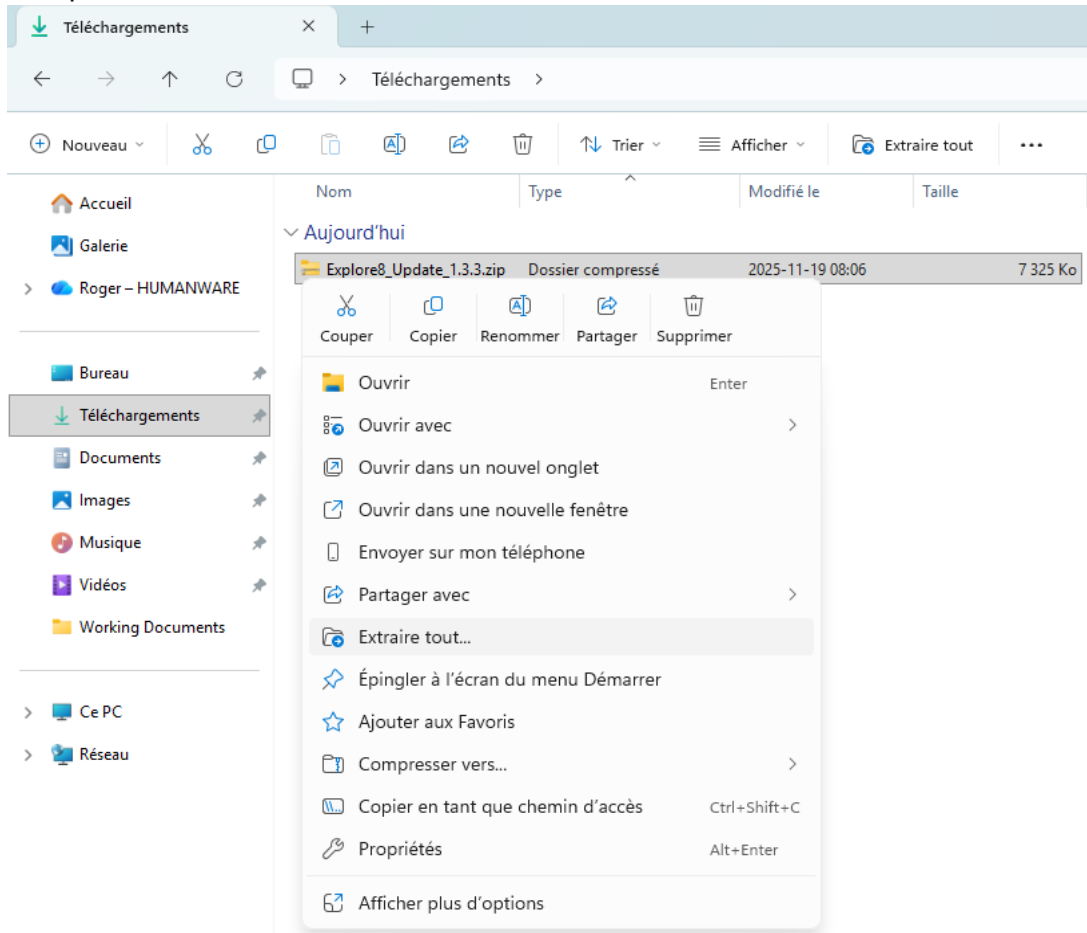

4. Branchez l'exploré 8 à l'ordinateur où les fichiers ont été téléchargés à l'aide du câble USB fourni.
5. Ouvrez le dossier des fichiers extraits à l'étape 3.


Repérer ces deux fichiers: Explore8_1.2.8.655.BRN and Explore8SF_1.2.8.655.BRN.

Copiez-collez ou glissez-déposez ces deux fichiers à la racine de l'exploré 8.

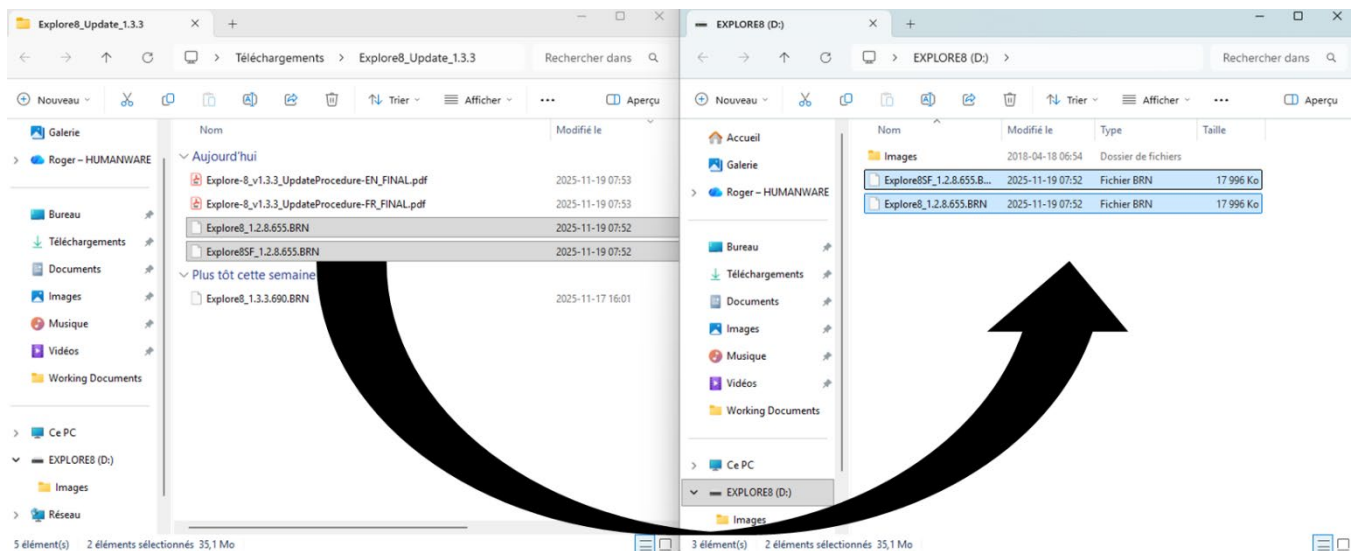

6. Débranchez l'appareil de l'ordinateur.
7. Redémarrez l'appareil en appuyant sur le bouton d'alimentation.
8. L'écran affichera « mise à jour logicielle ».
9. Rallumez l'exploré 8 et vérifiez la version logicielle (voir l'étape 1). La version doit maintenant indiquer 1.2.8.655.
10. Eteignez l'appareil et rebranchez-le à l'ordinateur.
11. Ouvrez le dossier des fichiers extraits à l'étape 3.
Repérez le fichier : Explore8_1.3.3.690.BRN.

Copiez-collez ou glissez-déposez Explore8_1.3.3.690.BRN à la racine de l'exploré 8.

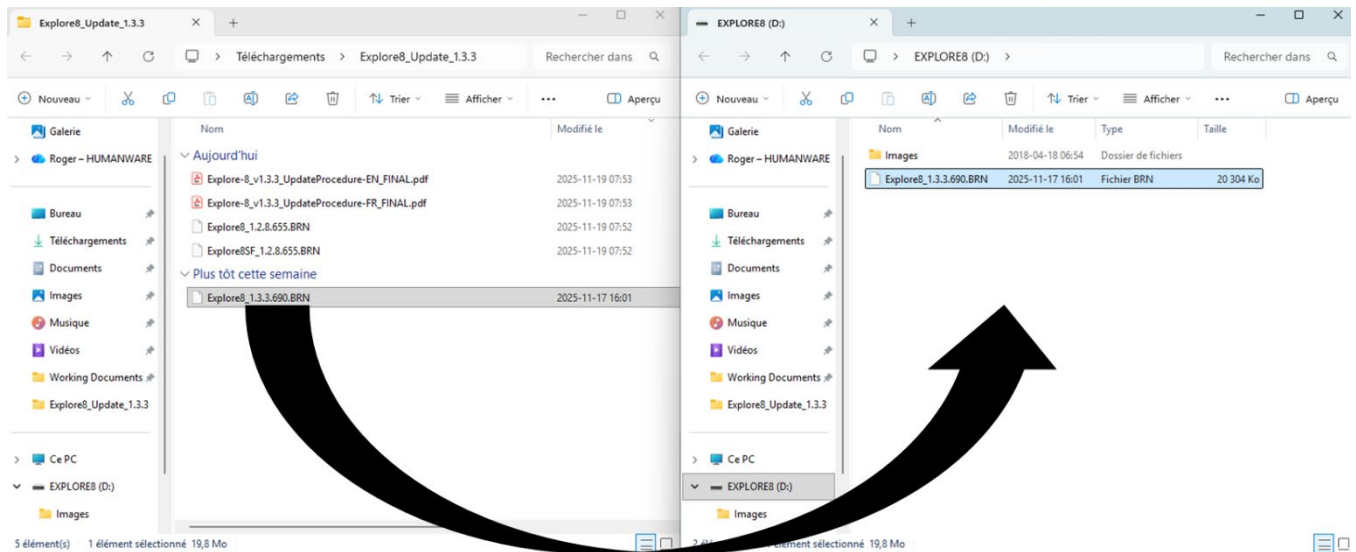

12. Débranchez l'appareil de l'ordinateur.
13. Redémarrez l'appareil en appuyant sur le bouton d'alimentation.
14. L'écran affichera « mise à jour logicielle ».
15. Rallumez l'exploré 8 et vérifiez la version logicielle (voir l'étape 1). La version doit maintenant indiquer 1.3.3.690.

Félicitations ! Votre exploré 8 est à jour. Consultez le plus récent **Guide de l'utilisateur** et les **nouvelles vidéos** présentant les fonctions ajoutées à votre appareil. Ces ressources sont accessibles sur la page d'assistance exploré : <https://www.humanware.com/support/explore-8-handheld-electronic-magnifier/>.

Dites-nous comment nous nous débrouillons.

***Avec le temps le numéro de version peut être plus élevé, mais le processus demeure le même.**