

## **Apropos : Caméra à distance Kodak SL10 ou SL25 et tablettes Connect**

Vous n'avez besoin d'aucune application supplémentaire pour installer les caméras Kodak dans le logiciel Prodigy. Votre Connect est compatible avec les deux modèles d'appareils photo, mais vous ne pouvez coupler qu'un seul appareil à la fois. Veillez à utiliser la version 1.5.1 du logiciel Prodigy, ou une version plus récente, lorsque vous utilisez des caméras Kodak.

## **Instructions: Appairage sans fil d'appareils photo Kodak à des tablettes Connect**

1. Chargez d'abord l'appareil photo.
2. Mettez l'appareil photo Kodak sous tension en appuyant sur le bouton d'alimentation, et l'objectif se déploie.
3. Sur votre tablette Connect, accédez à Prodigy : Paramètres → Système → Configuration Wi-Fi → Réseaux Wi-Fi.
4. Recherchez le "réseau" Kodak PIXPRO-SL10\_XXXX (sans Internet).
  - A. Pour le modèle SL25, sélectionnez PIXPRO-SL25\_XXXX.
  - B. XXXX représente des caractères uniques permettant de distinguer les appareils photo de la même marque, mais sur un canal unique.
  - C. \*Si\* vous ne voyez pas votre appareil photo, appuyez sur "Scan for Wi-Fi".
5. Tapez sur le "réseau" de l'appareil photo à appairer. Tapez ensuite sur "Connecter".
6. Saisissez le code d'appariement : 12345678 et appuyez sur Connect to pair.

**Important :** certains appareils photo récents ont pour mot de passe 00000000. Cela est indiqué par une étiquette très visible.
7. L'application Distance sera automatiquement ajoutée au carrousel Prodigy.

**Remarque 1 :** si un appareil photo Sony QX était précédemment installé sur la tablette Connect, désinstallez l'application Sony PlayMemories **avant** d'appairer un appareil photo Kodak SL.

**Remarque 2 :** un seul appareil photo peut être utilisé à la fois, même si plusieurs sont jumelés. Allumez l'appareil photo requis pour la session et éteignez le second appareil photo.

**Remarque 3 :** HumanWare fournit un logiciel spécial pour les appareils photo Kodak. Les appareils photo disponibles dans le commerce ne fonctionneront pas avec les appareils Connect.

**Remarque 4 :** pour activer la fonctionnalité vidéo, installez l'application Kodak PixPro et insérez une carte USB pour enregistrer les fichiers. Les appareils Connect ne prennent pas en charge les fonctions vidéo.