



logiciel Prodigy

propulsé par Humaware

Nouveautés Prodigy Windows v1.5

Nous sommes ravis de vous annoncer que Prodigy Windows v1.5 étend l'assistant IA Prodigy, ajoute dix bibliothèques supplémentaires et la prise en charge des livres audio à l'application Livres, et améliore la lecture, la navigation et la stabilité générale.

Assistant IA Prodigy

Désormais disponible sous forme d'application distincte dans le carrousel principal

Utilisez la nouvelle icône **Assistant IA** pour poser des questions générales et obtenir de l'aide à tout moment.

Disponible dans plus d'endroits

Vous pouvez également utiliser l'**Assistant** dans l'application **Loupe, Fichiers, Livres et Distance** pour poser des questions sur les sujets suivants:

- Les descriptions de scène vues par la caméra
- Les images et documents enregistrés ou importés
- Les pages de livres et de magazines
- Les questions générales

Vos conversations enregistrées avec votre contenu

Lorsque vous posez des questions sur un fichier, une image ou un livre, la conversation est enregistrée avec cet élément afin que vous puissiez reprendre là où vous vous êtes arrêté. Les réponses précédentes peuvent toujours être consultées, même lorsque vous êtes hors ligne.

Saisie vocale et lecture facilitée

Vous pouvez **poser vos questions à voix** haute. Un bref bip confirme le début et la fin de l'enregistrement. Il est désormais possible d'utiliser le pointer-cliquer et les gestes pour démarrer et arrêter la lecture à partir de n'importe quel mot dans une conversation. Une **nouvelle barre d'outils** comprenant des commandes de lecture et de zoom, ainsi que des options permettant d'ajuster le texte de la conversation et de modifier la vitesse de lecture ou les paramètres vocaux.



logiciel Prodigy

propulsé par Humaware

Messages clairs sur la confidentialité et verrouillage des fonctionnalités

Avant de partager une page de livre, une image ou un texte avec l'Assistant, Prodigy affiche un message clair pour vous informer de ce qui est partagé. Le verrouillage des fonctionnalités a également été amélioré afin de limiter l'accès à l'IA lorsque cela est nécessaire.

Livres et livres audio

Prise en charge des livres audio

Les livres audio **peuvent désormais être lus**. Ils sont clairement identifiés dans les bibliothèques et comprennent :

- Contrôle de la vitesse de lecture
- Menus de navigation et de signets (saut par chapitre ou par durée)
- Raccourcis clavier pour un contrôle rapide

Plus de bibliothèques, un accès plus facile

Le soutien a été étendu à **Blind Low Vision NZ** et à neuf bibliothèques supplémentaires. Le **Projet Gutenberg** est désormais activé par défaut pour offrir un accès immédiat.

Mises à jour relatives à la facilité d'utilisation et à la stabilité

Grâce à ces mises à jour utiles, vous pouvez :

- Activer ou désactiver **l'assistant IA, les livres et la distance** dans le carrousel principal, ce qui simplifie l'écran d'accueil.
- **Faire pivoter les images** partagées avec l'assistant IA.
- **Copier les noms de fichiers** si nécessaire.
- Garder le focus lors de la suppression d'éléments dans Fichiers.
- Afficher les longs fichiers texte avec une **pagination virtuelle** pour faciliter la lecture.
- Modifier **la vitesse de lecture** directement dans Fichiers pendant la lecture.
- Utiliser **les raccourcis des touches F** sur n'importe quel clavier.
- Naviguer avec des **sons de boutons** plus cohérents.
- Bénéficier d'améliorations générales en termes de **stabilité**, de **performances** et de **fiabilité** lors de longues sessions.

Comment obtenir cette mise à jour



logiciel Prodigy

propulsé par Humaware

Prodigi vous avertira lorsque la version 1.5 sera disponible. Vous pouvez également vérifier manuellement :

1. Ouvrez **Prodigi**.
2. Allez dans **Paramètres > Système > Mise à jour logicielle**.
3. Suivez les instructions.

Vos fichiers et paramètres sont conservés pendant la mise à jour.

Vidéos d'assistance

Visitez [la liste de lecture YouTube de Prodigy pour Windows](#) ou cliquez sur le lien dans l'application d'aide pour en savoir plus sur les caractéristiques, les fonctions et les avantages du logiciel.

Merci d'avoir choisi Prodigy Windows. Nous nous engageons à améliorer continuellement votre expérience de lecture et d'agrandissement. [Faites-nous part de vos commentaires !](#)

Correction de bogues dans Prodigy v1.5

- PROW-4099 : texte en anglais alors que le français est attendu dans les fichiers.
- PROW-5368 : arrêt occasionnel de Prodigy après la mise en veille de l'appareil.
- PROW-5369 : plantage aléatoire lors de l'importation d'un fichier TXT contenant des caractères non pris en charge.
- PROW-5370 : fermeture inattendue de Prodigy lors d'une navigation rapide dans les paramètres.
- PROW-5371 : l'assistant IA Magnifier échoue lors de l'utilisation d'une carte SIM pour Internet.
- PROW-5484 : le téléchargement de livres revient toujours à la première page des résultats de recherche.
- PROW-5488 : erreur de l'application Livres lors de l'ouverture d'un livre au format PDF.
- PROW-5489 : l'application Livres ne commence parfois pas la lecture à partir de la page de couverture.
- PROW-5543 : Problème d'enregistrement de fichiers multi-captures, uniquement des images, dans Magnifier.
- PROW-5613 : La synthèse vocale ne s'active pas avec du texte collé dans Fichiers lorsque « Speech On » est activé.



logiciel Prodigy

propulsé par Humaware

- PROW-5718 : Les paramètres - À propos ne s'affichent pas correctement en français (pas de synthèse vocale pour « dot »).
- PROW-5874 : Ajout de fichiers journaux à la barre de défilement.
- PROW-5924 : Problème de connexion à OneDrive sur un appareil déconnecté.
- PROW-5925 : Les fichiers plantent à la fermeture de l'application lorsque OneDrive est déconnecté pendant l'utilisation.
- PROW-5950 : Le clic répété sur « Enregistrer » en mode multi-capture crée un document vide.
- PROW-5951 : Le flux de la caméra se fige après la mise en veille de l'appareil.
- PROW-5956 : Erreur de pagination (ordre perdu) lors de l'exportation d'un fichier.
- PROW-5976 : Message TTS incorrect avec « Speech On » et aucune caméra sélectionnée.
- PROW-6012 : les fichiers plantent lors du renommage d'un fichier avec un nom de fichier existant.
- PROW-6013 : les fichiers plantent lors de la copie de noms de fichiers contenant des caractères spéciaux (non pris en charge).
- PROW-6018 : le téléchargement du résumé des livres ne redémarre pas la synthèse vocale au début une fois terminé.
- PROW-6019 : L'outil de signet est désactivé à la dernière page et au dernier mot du livre.
- PROW-6020 : Le comportement de la touche F ne respecte pas la pression sur les touches secondaires (shift, alt, etc.).
- PROW-6093 : « Version » n'est pas prononcé avec « Speech On » dans le menu À propos.
- PROW-6098 : La rotation de l'image OCR ne s'affiche pas lors du réglage de la luminosité.
- PROW-6105 : Résultats inattendus lors de l'utilisation de Insert Capture dans un fichier Prodigy de plusieurs pages.