



Guide d'accessibilité pour Prodigy Windows

Caractéristiques d'accessibilité	
Fonctionnalité	Description
Configuration de l'accessibilité	Pour accéder aux paramètres d'accessibilité de Windows pour configurer la couleur et la taille du pointeur de la souris, l'apparence du curseur de texte, etc. Réglages → Système → Accessibilité.
Dispositifs d'accès alternatifs	Prise en charge de la navigation à l'aide de raccourcis clavier, de la souris, de l'écran tactile et de dispositifs d'accès alternatifs tels que des commutateurs d'accessibilité.
Autofocus	Effectuer automatiquement la mise au point sur les documents ou les objets, avec la possibilité de verrouiller ou de déverrouiller la mise au point. Double-tapez ou cliquez dans la loupe (en direct).
Contraste des couleurs personnalisable	Sélectionner parmi 24 combinaisons de couleurs et de contrastes pour s'adapter aux différentes préférences visuelles. Réglages → Interface utilisateur.
Affichage à contraste élevé	Améliorer la clarté visuelle et le confort en rendant le texte et les images plus lisibles pour les personnes malvoyantes. Passez d'une vue en couleur à une vue en couleurs positive ou en couleurs négative en balayant le doigt ou en cliquant et glissant le pointeur de souris sur la droite de l'écran.
Lecture en surbrillance	Affiche un cadre positif-négatif autour de chaque mot prononcé tout en utilisant la synthèse vocale pour aider à maintenir la concentration. Loupe et fichiers → Réglages.
Couleur du localisateur	Couleur de la boîte visuelle à l'écran indiquant l'élément en focus. 8 couleurs disponibles. Réglages → Interface utilisateur.
Agrandissement	Offre une large gamme de niveaux d'agrandissement (jusqu'à 28x pour les images en temps réel et jusqu'à 80x pour les images capturées). Loupe, Distance et Fichiers.
Support multilingue	Jusqu'à quatre voix parmi plus de 75 disponibles dans plus de 18 langues, peuvent être installés. L'interface logiciel peut être affichée dans la langue choisie. Réglages → Interface utilisateur.
Reconnaissance optique de caractères (OCR)	Reconnaît le texte dans les documents capturés ou importés pour l'afficher dans une police appelé Diamond Edge™ avec les contrastes choisis par l'utilisateur.
Taille du pointeur	Permet de régler le pointeur à l'écran sur une échelle de 1 à 15. Réglages → Interface utilisateur.

Zoom préféré	Les utilisateurs peuvent définir un niveau de zoom par défaut pour les documents et les images capturés. Loupe et fichiers → Réglages.
Modes de lecture	Offre différents modes de lecture (Page, Colonne, Ligne) pour s'adapter aux différentes préférences et tâches de lecture. Loupe et fichiers → Réglages.
Luminosité de l'écran	Permet aux utilisateurs de régler la luminosité de l'écran en fonction de leurs besoins visuels et des conditions d'éclairage. Réglages → Interface utilisateur.
Sons	Un retour audio est fourni pour des actions spécifiques telles que cliquer sur une application. Réglages → Audio. Les options comprennent l'absence de parole, la lecture de documents seulement, ou tout ce qui se trouve dans l'interface logiciel. Loupe → Réglages et Réglages → Audio.
Paramètres de la parole	Convertit le texte imprimé en mots parlés, ce qui permet d'accéder aux documents imprimés. Disponible dans Réglages et Fichiers.
Interface utilisateur	Trois fonctionnalités d'accessibilité principales peuvent être ajustées : 1) le nombre d'icônes d'applications affichées dans le carrousel : 1, 2 ou 4; 2) les applications disponibles affichées dans le carrousel : Assistant IA✓, Livres✓, Distance ou Applications; 3) le mode plein écran ou le mode fenêtres. Paramètres → Interface utilisateur → Interface.
Synthèse vocale	Permet aux utilisateurs de choisir parmi plusieurs voix de synthèse vocale dans différentes langues et dialectes en fonction de leurs préférences. Réglages →, Interface utilisateur et Fichiers.

Claviers (lors de l'utilisation de Prodigy)

Standard	Clavier Bluetooth HumanWare (nouveau Windows – avril 2026)	Résultat
Ctrl + C	Ctrl + C	Copie
Ctrl + X	Ctrl + X	Couper
Ctrl + V	Ctrl + V	Coller
Touche Windows + flèche vers le haut	NA	Maximiser la fenêtre
Touche Windows + M	NA	Minimiser l'application

Touche Windows + Tab	NA	Ouvrir l'écran des tâches
Touche Windows + D	NA	Afficher et masquer le bureau
Alt + Tab	Alt + Tab	Passer d'une application à l'autre
Touche Windows + X	NA	Ouvrir le menu Quick Link
Touche Windows + L	NA	Verrouillez le PC
Ctrl + Q	Ctrl + Q	Quitter
ESC	ESC	Retour
F1	F1	Ouvrir les réglages de l'affichage actuel
F2	F2	Ouvrir l'application Assistant IA
F3	F3	Ouvrir l'application Loupe
F4	F4	Ouvrir l'application Distance
F5	F5	Ouvrir l'application Livres
F6	F6	Ouvrir l'application Fichiers
F7	F7	Diminuer la rapidité de lecture
F8	F8	Capter l'image / Démarrer ou arrêter la lecture
F9	F9	Augmenter la rapidité de lecture
F10	F10	Diminuer le volume
F11	F11	Activer ou désactiver le son
F12	F12	Augmenter le volume
Touches fléchées	Touches fléchées	Déplacer le localisateur
Ctrl + Flèche vers le haut	Ctrl + Flèche vers le haut	Déplacement dans une image capturée Faire défiler le texte dans le mode de lecture colonne Quand l'écran est divisé change le focus de la fenêtre de l'application
Ctrl + Flèche vers le bas	Ctrl + Flèche vers le bas	Déplacement dans une image capturée Faire défiler le texte dans le mode de lecture colonne Quand l'écran est divisé change le focus de la fenêtre de l'application

Ctrl + Flèche gauche	Ctrl + Flèche gauche	Déplacement dans une image capturée Faire défiler le texte dans mode de lecture ligne Page précédente Quand l'écran est divisé change le focus de la fenêtre de l'application
Ctrl + Flèche droite	Ctrl + Flèche droite	Déplacement dans une image capturée Faire défiler le texte dans mode de lecture ligne Page suivante Quand l'écran est divisé change le focus de la fenêtre de l'application
Plus (+)	Plus (+)	Zoom plus / Augmenter la taille du texte
Moins (-)	Moins (-)	Zoom moins / Diminuer la taille du texte
Ctrl + B	Ctrl + B	Afficher ou masquer la bannière de boutons
ESC Ctrl + Q Alt + F4	ESC Ctrl + Q Alt + F4	Quitter l'application actuelle
Ctrl + S	Ctrl + S	Sauvegarder l'image
TAB	TAB	Déplacer le focus
Shift + F10	Shift + F10	Ouvrir le menu contextuel d'un élément
Entrer Barre d'espace	Entrer Barre d'espace	Confirmer une sélection ou une action Un appui long d'une seconde ouvre le menu contextuel d'un élément Démarrer ou arrêter la lecture

Écrans tactiles

Geste	Résultat
Pincement et zoom	Faites glisser deux doigts l'un contre l'autre pour dézoomer, écartez les doigts pour zoomer.
Geste d'effleurement	Effleurer une fois pour sélectionner des applications, des préférences, etc.
Geste de double tapotement	Tapez deux fois rapidement : Dans l'en-tête du carrousel, permet de revenir à Windows. Dans l'application Loupe pour activer/désactiver la mise au point automatique.

Geste d'appui long	<p>Appuyez sur la touche et maintenez-la enfoncée pendant environ 1 seconde :</p> <p>Dans la loupe pour capturer des images.</p> <p>Dans Fichiers pour ouvrir le menu d'action.</p> <p>Ouvrir le menu contextuel de l'élément sélectionné</p>
Balayer	<p>Haut, bas, gauche et droite pour naviguer.</p> <p>Dans la loupe, balayez vers le haut ou vers le bas sur le côté gauche de l'écran pour basculer entre les modes temps réel et Captures multiples.</p> <p>Dans la Loupe ou les Fichiers, balayez vers le haut ou vers le bas sur le côté droit de l'écran pour passer d'un contraste à l'autre : Positif, Négatif, Couleur.</p>
Appui long avec deux doigts	Afficher le texte complet de l'élément sélectionné (menu ou nom de fichier).

Souris

Action	Résultat
Clique gauche	Sélectionner un élément à l'écran (application, élément de menu, fichier, etc.)
Clique droit	Dans Fichiers, ouvrir les menus contextuels pour supprimer, renommer, etc.
Clique long (environ 1 seconde)	Dans la Loupe, capturez une image. Dans un fichier, démarre ou arrête la lecture.
Roulette de défilement	Dans la Loop ou Distance, Zoomer et dézoomer. Dans Réglages ou les menus, naviguer de haut en bas ou de bas en haut. Déplacer le localisateur.
Cliquer et glisser	Dans la loupe, sur le côté gauche de l'écran, permet de basculer entre les modes temps réel et Captures multiples. Dans la loupe ou dans un fichier ouvert, permet de basculer entre les contrastes positifs, négatifs et couleur.
Double clique	Dans la loupe, active/désactive la mise au point automatique. Dans un fichier, active/désactive la parole.

[Tenez-nous au courant!](#)