



# logiciel Prodigy

propulsé par Humanware

## Conseils pour l'essai de Prodigy pour Windows

*Des façons simples de tirer le maximum de votre essai de 14 jours*

Commencez avec l'aide intégrée et le contenu d'exemple avant de passer à vos propres fichiers ou à des tâches plus avancées.

### Un bon point de départ

#### 1. Ouvrez l'application Aide

L'application **Aide** est l'un des meilleurs endroits où commencer pendant votre essai. Elle vous donne un accès direct à :

- un guide de démarrage rapide
- le guide d'utilisation complet
- des vidéos « Comment faire » sur la chaîne YouTube de HumanWare
- d'autres ressources de soutien
- des outils de rétroaction pour aider à améliorer Prodigy

Vous pouvez aussi accéder à ces mêmes ressources de soutien sur le site Web de HumanWare :

[https://www.humanware.com/support/prodigy\\_software/](https://www.humanware.com/support/prodigy_software/)

#### 2. Allez dans Réglages

Avant d'aller trop loin, passez un peu de temps dans **Réglages**. Plusieurs utilisateurs préfèrent d'abord ajuster l'expérience visuelle et de lecture. La plupart des ajustements se font dans **Interface utilisateur**. Essayez :

- les réglages de contraste et de couleur
- la parole activée, désactivée ou pour les documents seulement
- le débit de la voix
- la luminosité de l'écran
- la taille du pointeur de la souris
- d'autres options d'interface, comme le mode fenêtres

Être à l'aise avec ces options peut rendre le reste de l'essai plus facile.



# logiciel Prodigy

propulsé par Humāware

### 3. Ouvrez les documents d'exemple dans Fichiers

Si vous n'avez pas de caméra de documents et que vous ne voulez pas importer vos propres fichiers tout de suite, ouvrez les **documents d'échantillons** inclus dans **Fichiers**. C'est une façon simple de commencer à apprendre Prodigy et de tester les réglages.

### 4. Passez ensuite aux outils qui conviennent à votre configuration

Plusieurs utilisateurs qui essaient Prodigy n'ont pas de caméra de documents. Ce n'est pas un problème.

Si vous n'avez pas de caméra de documents, concentrez-vous sur :

- **Fichiers** pour ouvrir les échantillons ou importer vos propres fichiers PDF, DOCX, TXT, JPG et PNG
- **Livres** pour le contenu de bibliothèques, les livres audio et les fichiers EPUB
- **Assistant IA** pour des questions rapides, des résumés et des explications
- **Applications** pour accéder plus facilement aux applications Windows
- le **mode Interface fenêtres** si vous voulez une expérience de type ordinateur plus familière

Si vous avez une caméra de documents, essayez aussi :

- Loupe pour l'affichage en direct
- la capture + ROC pour une lecture plus approfondie
- les questions à l'IA sur ce qui se trouve sous la caméra

**Note :** si vous utilisez une tablette, la caméra intégrée peut être utilisée pour tester l'application **Loupe**.

### Meilleure façon d'évaluer l'essai

Commencez par les tâches de près. Prodigy est particulièrement efficace pour :

- lire des documents
- comprendre rapidement l'information
- écouter du texte avec la synthèse vocale
- travailler avec des fichiers enregistrés ou importés
- réduire l'effort et la fatigue visuelle



# logiciel Prodigy

propulsé par Humāware

Parfois, le grossissement suffit. Parfois, l'IA est la façon la plus rapide de comprendre quelque chose. Parfois, la ROC et la synthèse vocale sont préférables lorsque vous avez besoin de tous les détails. Souvent, une combinaison des trois est nécessaire.

## **Parcours simple à suivre**

Un bon parcours de départ est :

**Application Aide → Réglages → Documents d'échantillons dans Fichiers → Vos propres fichiers → Autres fonctions comme Livres, Assistant IA, Applications et Loupe lorsqu'une caméra de documents est disponible**

## **À propos de Distance**

**Distance** est disponible pour les utilisateurs qui en ont vraiment besoin, mais elle ne devrait pas être l'élément principal pour la plupart des adultes qui font l'essai. Elle nécessite une deuxième caméra connectée. Commencez par la lecture de près, les fichiers, les livres, l'IA et l'accès à l'information de tous les jours.



# logiciel Prodigy

propulsé par Humāware

## Idées d'essai par groupe d'utilisateurs

**Enseignants et personnel en éducation :** Utilisez Prodigy avec les types de matériel que vous soutenez chaque jour, comme les feuilles d'exercices, les documents remis aux élèves, les lectures en classe, les PDF et les documents numériques. Essayez d'abord l'application Aide, Réglages, les fichiers d'exemple et les fichiers importés. Au besoin, explorez comment l'IA, la ROC et la synthèse vocale peuvent soutenir l'accès à la lecture, la compréhension et l'endurance.

**Étudiants adultes :** Essayez Prodigy avec des lectures obligatoires, des articles, des PDF, du matériel de recherche et de longs textes numériques. Testez ce qui aide le plus : le grossissement, l'IA pour une compréhension rapide, ou la ROC et la synthèse vocale pour une lecture complète. Livres, Fichiers et Assistant IA peuvent être particulièrement utiles.

**Travailleurs adultes :** Utilisez Prodigy avec de vrais documents de travail, comme des PDF, des formulaires, des rapports, des manuels et des documents imprimés. Essayez le mode Interface fenêtres et Applications pour voir comment Prodigy s'intègre à votre flux de travail informatique habituel. Concentrez-vous sur la façon dont il peut vous aider à travailler plus confortablement et plus efficacement.

**Aînés adultes :** Commencez par des tâches familières, comme lire le courrier, les factures, les instructions, les articles et les documents personnels. Commencez avec réglages et les fichiers d'exemple pour trouver des options de contraste, de synthèse vocale et de lecture confortables. Passez ensuite à vos propres fichiers et aux tâches de lecture de tous les jours.

**Personnes qui soutiennent des utilisateurs adultes :** Concentrez-vous d'abord sur les tâches réelles de l'utilisateur. Commencez simplement avec Aide, réglages et les fichiers d'exemple avant de passer aux fichiers personnels ou aux fonctions plus avancées. Observez ce qui améliore le confort, l'accès, la compréhension et l'endurance, et notez quels outils semblent les plus utiles dans la vie quotidienne.

**Dernier conseil :** Commencez simplement. Utilisez l'application Aide, ajustez les réglages, essayez les documents d'exemple dans Fichiers, puis passez aux tâches de la vraie vie. Le meilleur essai est celui qui montre comment Prodigy s'intègre à la lecture, à la compréhension et au travail de tous les jours.