



logiciel Prodigy

propulsé par Humānware

Utilisation de l'IA dans Prodigy

Quand l'utiliser et à quoi faire attention : L'IA dans Prodigy peut vous aider à comprendre l'information plus rapidement et avec moins d'effort.

Vous pouvez utiliser l'Assistant IA dans :

- Loupe
- Fichiers
- Livres
- Distance
- l'application Assistant IA autonome

Commencez par votre objectif : Avant d'utiliser l'IA, demandez-vous :

- Ai-je besoin de l'idée principale?
- Ai-je besoin des mots exacts?
- Ai-je besoin d'aide pour décider quoi lire plus attentivement?
- Ai-je besoin d'aide pour comprendre un formulaire, un graphique, une image ou la mise en page d'une page?

Règles simples :

- Utilisez le grossissement lorsque vous voyez suffisamment bien.
- Utilisez l'IA lorsque vous avez besoin de comprendre rapidement.
- Utilisez la ROC et la synthèse vocale lorsque vous avez besoin de tous les détails.
- Utilisez les deux lorsque vous avez besoin d'une compréhension rapide et du texte exact.
- Faites confiance, mais vérifiez. L'IA n'est pas toujours exacte à 100 %.

L'IA peut aider avec des choses comme :

- comprendre ce qu'est un document
- obtenir un court résumé
- déterminer ce qui semble important
- expliquer quelque chose dans un langage plus simple
- poser des questions de suivi
- vous aider à décider quoi faire ensuite



logiciel Prodigy

propulsé par Humāware

Soyez prudent : l'IA est utile, mais elle n'est pas parfaite. Vérifiez la source originale lorsque :

- les mots exacts sont importants
- l'information est importante
- le sujet est médical, juridique, financier ou comporte autrement des enjeux élevés
- vous n'êtes pas certain que la réponse est complète ou correcte

Confidentialité et contrôle : Avant de partager du contenu avec l'Assistant IA, Prodigy affiche un message expliquant ce qui est partagé.

L'IA peut aussi être limitée ou désactivée au besoin. Cela peut être utile dans les écoles, les milieux de réadaptation, les milieux de travail ou d'autres environnements avec soutien.

Une bonne utilisation ressemble à ceci :

- « De quoi parle cette page? »
- « Qu'est-ce qui est le plus important ici? »
- « Dois-je lire ceci en entier? »
- « Peux-tu expliquer cela plus simplement? »
- « Maintenant, je vais vérifier le texte original. »

Conclusion : L'IA dans Prodigy est mieux utilisée pour réduire l'effort, soutenir la compréhension et vous aider à décider quoi faire ensuite.

C'est un outil pour vous soutenir, et non pour remplacer votre jugement.