

Prodigi

Guide de démarrage

Bienvenue dans Prodigi pour Windows

Tous les comptes Prodigi commencent par une version d'essai afin de vous permettre de démarrer rapidement.

Suivez ce guide pour **télécharger, installer** et **activer** le logiciel afin d'obtenir un accès complet.

.....

1



logiciel **Prodigi**

propulsé par Humañware

Télécharger et installer 

<https://qrco.de/Prodigi>

2

Termes et conditions



Refuser

Accepter

3



Plus que 14 jours à la
période d'essai de Prodigi

Continuer l'essai

Activer

Contactez-nous

Acheter

Choisissez l'option qui s'applique à votre situation

Invitation

Utilisateur organisationnel

4a

← Je possède :

Invitation

Clé d'activation

Compte existant

5a

← Invitation →

nom@example.com

6a

Vous avez reçu une invitation

Ignorer

Décliner

Accepter

7a

Créer un compte

Prénom

Nom,

Adresse courriel (nom d'utilisateur)

nom@example.com

Pays



Suivant

8a

Créer un compte

Mot de passe



Confirmer le mot de passe



Retour

S'inscrire

Clé d'activation

Utilisateur individuel

4b

← Je possède :

Invitation

Clé d'activation

Compte existant

5b

← Clé d'activation →

Adresse courriel

Clé d'activation



6b

Activer le compte

Adresse courriel

nom@example.com

Clé d'activation

Mot de passe



Confirmer le mot de passe



Annuler

Activer

Aller à l'étape 9

Utilisateur existant

Deuxième appareil

4c

← Je possède :

Invitation

Clé d'activation

Compte existant

5c

Se connecter

Adresse courriel (nom d'utilisateur)

Suivant

6c

Se connecter

nom@example.com

Mot de passe



[Mot de passe oublié ?](#)


Se connecter

Aller à l'étape 9


9

← Langue	Voix	Parole	Données d'utilisation ?
Voix sélectionnées : 1 de 4	Darius (États-Unis) >	Activée - Écran tactile direct	Oui
Anglais >	Deepa >	Activée - Accès alternatif	Non
Autres langues... >	Autres langues... >	Documents seulement	Détails >
		Désactivé	

10

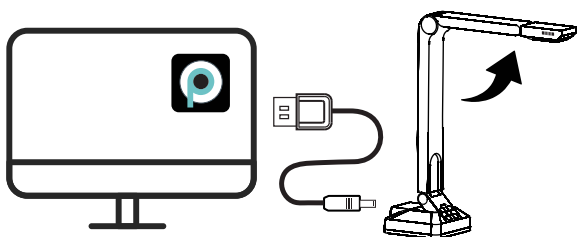

11

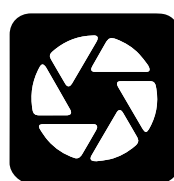

Loupe

← Caméra


Caméra intégrée

HoverCam Solo 8 Plus

Autre caméra ...

12

Commencer à agrandir

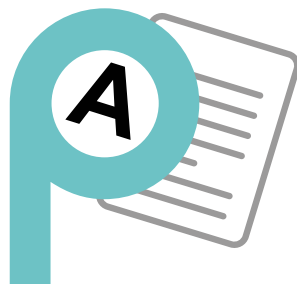

Pour plus d'informations sur l'utilisation de Prodigy pour Windows, veuillez consulter le **guide de l'utilisateur**.
www.humanware.com/support/prodigi_software/

Humanware

Membre du groupe EssilorLuxottica

ACCD-0349