

Guide d'accessibilité pour Prodigy Windows

Annexe A : Raccourcis clavier et actions de la souris

Cette annexe répertorie tous les raccourcis clavier et les actions de la souris pour Prodigy pour Windows. Le clavier standard et le clavier Bluetooth HumanWare partagent les mêmes affectations de touches pour toutes les fonctions Prodigy.

Remarque : Cette annexe reflète le Guide d'accessibilité Prodigy pour Windows daté de mai 2026. Les affectations de touches sont cohérentes entre le clavier standard et le clavier Bluetooth HumanWare pour toutes les fonctions Prodigy.

A.1 Raccourcis clavier

Standard	Bluetooth HumanWare	Action
Ctrl + C	Ctrl + C	Copier
Ctrl + X	Ctrl + X	Couper
Ctrl + V	Ctrl + V	Coller
Ctrl + Q	Ctrl + Q	Quitter / Quitter l'application actuelle
Ctrl + B	Ctrl + B	Afficher ou masquer la bannière de boutons
Ctrl + S	Ctrl + S	Enregistrer l'image
ESC	ESC	Retour
Alt + F4	Alt + F4	Quitter l'application actuelle

Standard	Bluetooth HumanWare	Action
Alt + Tab	Alt + Tab	Basculer entre les applications ouvertes
Alt + W	Alt + W	Démarrer ou arrêter le mode Fenêtres
TAB	TAB	Déplacer le focus du localisateur vers la zone ou l'élément suivant
Shift + TAB	Shift + TAB	Déplacer le focus du localisateur vers la zone ou l'élément précédent
Entrée / Barre d'espace	Entrée / Barre d'espace	Confirmer une sélection ou une action. Appuyer longuement pendant 1 seconde, puis relâcher ouvre le menu contextuel.
Shift + F10	Shift + F10	Ouvrir le menu contextuel de l'élément sélectionné
F1	F1	Ouvrir les Réglages pour la vue actuelle
F2	F2	Ouvrir l'application Assistant IA
F3	F3	Ouvrir l'application Loupe
F4	F4	Ouvrir l'application Distance
F5	F5	Ouvrir l'application Livres
F6	F6	Ouvrir l'application Fichiers
F7	F7	Diminuer la vitesse de lecture
F8	F8	Capturer une image / Démarrer ou arrêter la lecture
F9	F9	Augmenter la vitesse de lecture
F10	F10	Diminuer le volume
F11	F11	Activer ou désactiver la sourdine

Standard	Bluetooth HumanWare	Action
F12	F12	Augmenter le volume
Touches fléchées	Touches fléchées	Déplacer le localisateur vers le haut, le bas, la gauche, la droite ; faire défiler
Ctrl + flèche vers le haut	Ctrl + flèche vers le haut	Effectuer un panoramique dans une image capturée. Faire défiler le texte en mode de lecture Colonne. Changer le focus de l'application en écran partagé.
Ctrl + flèche vers le bas	Ctrl + flèche vers le bas	Effectuer un panoramique dans une image capturée. Faire défiler le texte en mode de lecture Colonne. Changer le focus de l'application en écran partagé.
Ctrl + flèche vers la gauche	Ctrl + flèche vers la gauche	Effectuer un panoramique dans une image capturée. Faire défiler le texte en mode de lecture Ligne. Aller à la page précédente. Changer le focus de l'application en écran partagé.
Ctrl + flèche vers la droite	Ctrl + flèche vers la droite	Effectuer un panoramique dans une image capturée. Faire défiler le texte en mode de lecture Ligne. Aller à la page suivante. Changer le focus de l'application en écran partagé.
Plus (+)	Plus (+)	Zoom avant / augmenter la taille du texte
Moins (-)	Moins (-)	Zoom arrière / diminuer la taille du texte
Windows + H	Windows + H	Ouvrir la saisie vocale de Windows (voix en texte pour tout champ de texte)
Windows + Flèche vers le haut	Windows + Flèche vers le haut	Agrandir la fenêtre
Windows + M	Windows + M	Réduire l'application
Windows + Tab	Windows + Tab	Ouvrir la vue des tâches
Windows + D	Windows + D	Afficher ou caché le bureau
Windows + X	Windows + X	Ouvrir le menu Lien rapide

Standard	Bluetooth HumanWare	Action
Windows + L	Windows + L	Verrouiller votre PC
M	M	Sélectionneur dans les outils d'annotation
P	P	Crayon dans les outils d'annotation
H	H	Surligneur dans les outils d'annotation
E	E	Gomme dans les outils d'annotation

A.2 Actions de la souris


Action de la souris	Résultat
Clic gauche	Sélectionner un élément (application, élément de menu, fichier, etc.)
Clic droit	Ouvrir le menu contextuel pour les fichiers et dossiers dans Fichiers, et les applications épinglées dans Apps
Double-clic	Dans Loupe : activer ou désactiver l'autofocus. Dans un fichier ouvert : activer ou désactiver la synthèse vocale.
Cliquer et maintenir pendant environ 1 seconde, puis relâcher.	Dans la Loupe : capturer une image. Dans un fichier ouvert : démarrer ou arrêter la lecture à partir de ce mot.
Clic et glisser (côté gauche de l'écran de la Loupe)	Basculer entre les modes Réel et Multi-capture
Clic et glisser (côté droit de la Loupe ou d'un fichier ouvert)	Parcourir les types de contraste : Couleur, Positif, Négatif

Action de la souris	Résultat
Molette de défilement	Dans Loupe : effectuer un zoom avant ou arrière. Dans les menus et les fichiers : faire défiler vers le haut ou vers le bas, déplacer le localisateur.
Ctrl + molette de défilement	Zoom avant ou arrière

Annexe B : Guide des gestes sur écran tactile


Les gestes suivants s'appliquent aux appareils à écran tactile. Tous les gestes peuvent être reproduits à l'aide d'une souris ou d'un clavier ; consultez l'[Annexe A](#) pour les actions équivalentes. [Annexe A](#) pour les actions équivalentes.

Pincement et zoom (2 doigts)

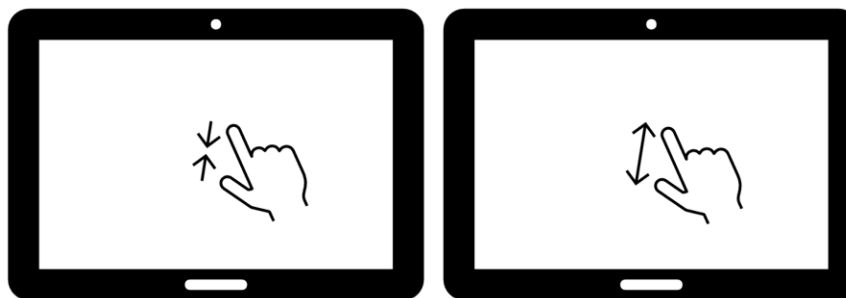


Placez deux doigts sur l'écran et écartez-les pour effectuer un zoom avant, ou rapprochez-les pour effectuer un zoom arrière. Utilisé dans la Loupe, Distance et Fichiers pour ajuster l'agrandissement.

Effleurement (1 doigt)

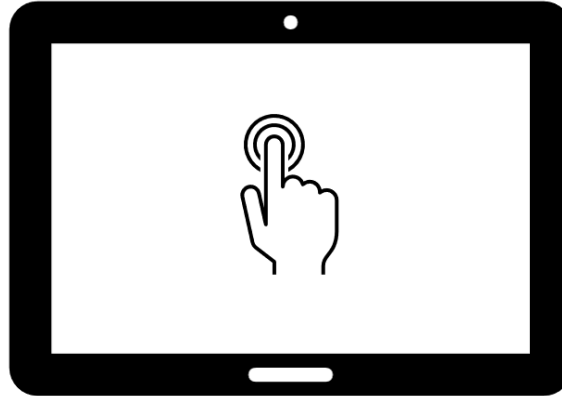


Touchez l'écran une fois avec un doigt. Utilisé pour sélectionner des applications, des éléments de menu, des fichiers et pour confirmer des choix.

Effleurement (2 doigts)

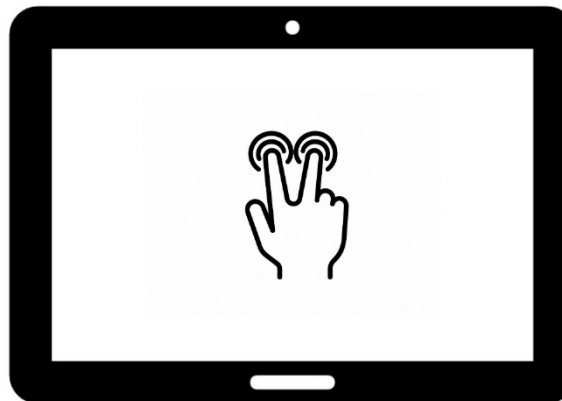


Appuyez deux doigts simultanément sur l'écran pour ouvrir le menu contextuel d'un élément. Par exemple, un fichier que vous souhaitez renommer ou supprimer.

Double effleurement (1 doigt)

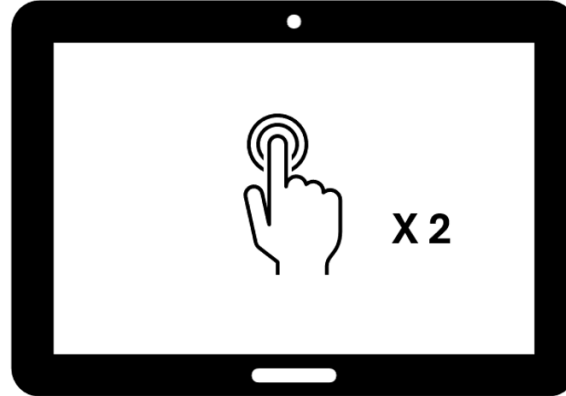


Touchez l'écran deux fois rapidement avec un doigt. Dans la barre d'en-tête du carrousel, le double toucher permet de quitter vers Windows. Dans l'application Loupe, un double toucher sur l'image en direct active ou désactive l'autofocus avec une caméra prise en charge.

Appui long (1 doigt)

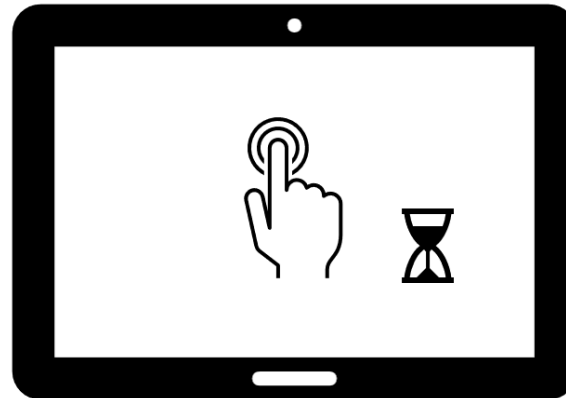

Appuyez et maintenez un doigt sur l'écran pendant environ une seconde. Dans la Loupe, l'appui long capture une image. Dans Fichiers et d'autres menus, il affiche le texte complet d'un élément sélectionné, comme un long nom de fichier ou une entrée de menu, dans un affichage contextuel. Dans une session de lecture, l'appui long sur un mot démarre la lecture par synthèse vocale à partir de ce mot.

Balayage (1 doigt)

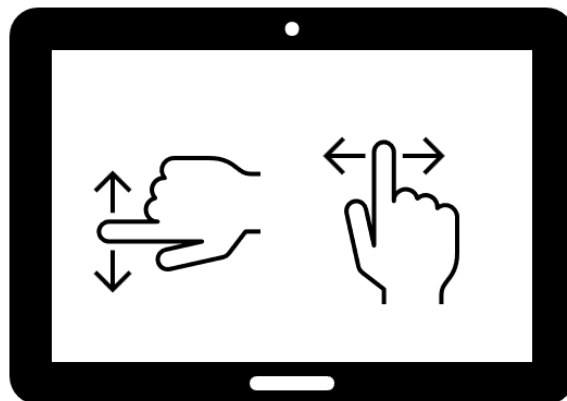

Faites glisser un doigt sur l'écran dans la direction souhaitée. Utilisé dans tout Prodigy pour faire défiler et naviguer.

- Dans la Loupe, balayez vers le haut ou le bas sur le côté gauche de l'écran pour basculer entre les modes Réel et Multi-capture.
- Dans la Loupe ou dans n'importe quel fichier ouvert, balayez vers le haut ou le bas sur le côté droit de l'écran pour parcourir les types de contraste : Couleur, Positif et Négatif.
- Dans Livres, balayez de droite à gauche pour avancer d'une page, ou de gauche à droite pour reculer d'une page.

[Tenez-nous au courant!](#)